

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Системы мониторинга физиологических показателей пациента «Сторм Д/ДС»

Назначение средства измерений

Системы мониторинга физиологических показателей пациента «Сторм Д/ДС» (далее - мониторы) предназначены для измерений, регистрации и хранения биоэлектрических потенциалов сердца, измерений непрерывного неинвазивного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO_2), измерений частоты пульса (ЧП) и частоты дыхания (ЧД), измерений температуры тела, систолического и диастолического артериального давления (АД), измерений содержания двуокиси углерода (CO_2) в выдыхаемой воздушной смеси, кислорода (O_2), закиси азота (N_2O) во вдыхаемой воздушной смеси и наблюдения на экране монитора значений измеряемых параметров состояния, включения тревожной сигнализации при выходе регистрируемых параметров за установленные пределы.

Описание средства измерений

Функционально мониторы состоят из независимых измерительных каналов.

Принцип работы канала электрокардиографии основан на измерении электрического потенциала сердца с помощью электродов, закрепленных на теле пациента.

Принцип работы канала пульсоксиметрии основан на измерении различия спектрального поглощения оксигемоглобина и восстановленного гемоглобина крови на двух длинах волн.

Принцип работы канала частоты дыхания основан на измерении импеданса между двумя электродами, установленными на грудь пациента.

Принцип работы канала артериального давления основан на определении систолического и диастолического артериального давления косвенным осциллометрическим способом для всех исполнений системы, кроме «Сторм-ДС1». Осциллометрический метод заключается в непосредственном определении систолического и диастолического давления кровеносных сосудов путем регистрации изменения давления в манжете при передаче на нее пульсации артерий и вычисления среднего значения.

Принцип работы канала термометрии основан на измерении и регистрации температуры тела пациента терморезисторами для всех исполнений системы кроме «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2». Принцип действия канала измерения температуры для системы в исполнении системы «Сторм-ДС2» основан на преобразовании инфракрасного излучения ушной полости, измеренного при помощи инфракрасного измерительного датчика температуры. После преобразования и обработки сигнала получают значение температуры тела.

Принцип работы канала капнометрии основан на измерении CO_2 в боковом потоке в выдыхаемом воздухе методом постоянной аспирации газа из дыхательных путей пациента для исполнений «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7». Забор газа осуществляется по магистрали, которая присоединяется к дыхательному контуру при помощи специального адаптера. Метод капнометрии в боковом потоке требует системы обезвоживания газа. Для исполнений «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7» принцип работы канала капнометрии основан на измерении и регистрации массовой концентрации двуокиси углерода (EtCO_2) в выдыхаемом пациентом воздухе методом инфракрасно-оптического анализа.

Принцип действия канала газового анализа основан на методе поглощения инфракрасных лучей для исполнений «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7». Газы (кислород и закись азота), концентрацию которых определяет модуль газоанализатора, способны поглощать инфракрасное излучение. Кроме того, каждый газ имеет свои абсорбционные характеристики. Сначала газ попадает в контейнер для проб (измерительную камеру). Затем оптический инфракрасный фильтр определяет диапазон инфракрасного излучения со специальной длиной волны для просвечивания пробы газа.

При заданном объеме, чем выше концентрация газа, тем больше поглощение. Подсчитав количество света, прошедшего через газ, можно затем рассчитать его концентрацию по специальной формуле. Результаты измерения отображаются на дисплее системы в численном выражении (в % или мм. рт. ст.) и графически.

Системы мониторинга конструктивно состоят из основного блока, подключаемого к источнику переменного тока по средствам кабеля питания, а также с возможностью работы от автономного источника питания, комплекта модулей, комплекта датчиков и набора принадлежностей. Основной блок включает входные преобразователи параметров функционального состояния пациента, тракты измерения и регистрации параметров. Сигналы от измерительных каналов обрабатываются встроенным процессором с общим программным обеспечением.

Системы мониторинга имеют цветной ЖК-дисплей, на котором могут одновременно отображаться измеряемые показатели, сигналы в виде колебаний и информация о тревожных сигналах, состояние мониторинга пациента, время и другая информация. В мониторах предусмотрено включение тревожной сигнализации при выходе измеряемых параметров за установленные пределы.

Системы мониторинга физиологических показателей пациента выпускаются в следующих модификациях: «Сорм-ДС1», «Сорм-Д1», «Сорм-ДС2», «Сорм-Д2», «Сорм-Д3», «Сорм-Д5», «Сорм-Д6», «Сорм-Д8», «Сорм-ДС3», «Сорм-ДС5», «Сорм-ДС7». Модификации различаются количеством каналов измерения, назначением, исполнениями корпуса, габаритными размерами.

Общий вид систем мониторинга физиологических показателей пациента «Сорм Д/ДС» представлен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



«Сорм-Д1»



«Сорм-Д2»



«Сторм-Д3»



«Сторм-Д5»



«Сторм-Д6»



«Сторм-Д8»



«Сторм-ДС1»



«Сторм-ДС2»



«Сторм-ДС3»



«Сторм-ДС5»



«Сторм-ДС7»

Рисунок 1 - Общий вид средства измерений



«Сторм-Д1»



«Сторм-Д2»



«Сорм-Д3»



«Сорм-Д5»



«Сорм-Д6»



«Сорм-Д8»



«Сорм-ДС1»



«Сорм-ДС2»

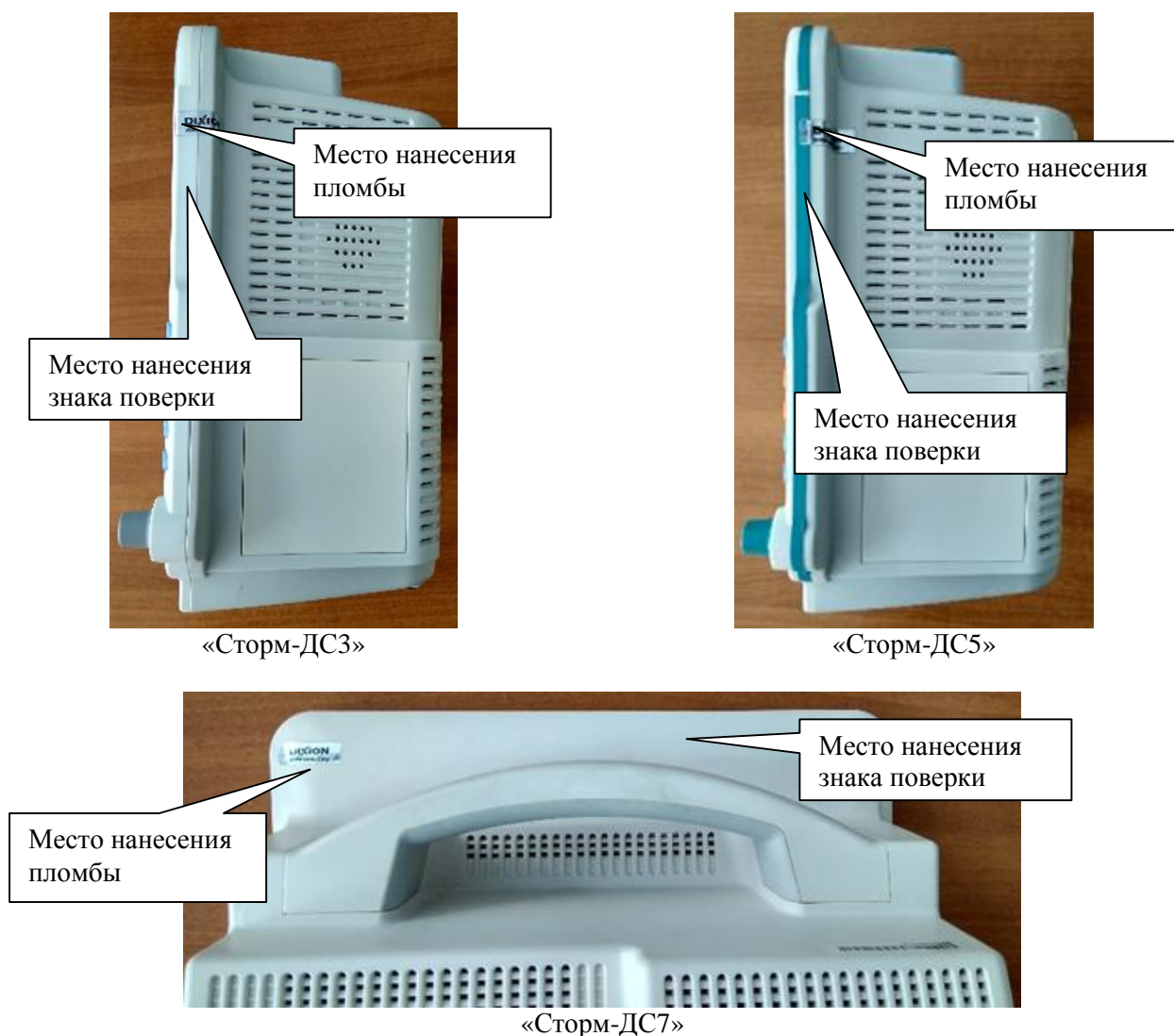


Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Системы мониторинга имеют встроенное программное обеспечение, специально разработанное для выполнения измерений, хранения, передачи и просмотра результатов измерений в реальном времени на дисплее измерительного блока.

Структура встроенного программного обеспечения представляет древовидную форму.

ПО запускается автоматически после включения прибора в сеть. Программное обеспечение идентифицируется на экране системы мониторинга по номеру версии в окне меню «Монитор Инфо».

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

При нормировании метрологических характеристик учтено влияние программного обеспечения.

Таблица 1 - Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО

[illegible]

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

[illegible]

Продолжение таблицы 2

[illegible]

Продолжение таблицы 2

[illegible]

Продолжение таблицы 2

[illegible]

Продолжение таблицы 2

| Наименование характеристики | Значение | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | «Сторм-Д1» | «Сторм-ДС1» | «Сторм-ДС2» | «Сторм-Д2» | «Сторм-Д3» | «Сторм-Д5» | «Сторм-Д6» | «Сторм-Д8» | «Сторм-ДС3» | «Сторм-ДС5» | «Сторм-ДС7» |
| Диапазон измерений объемной доли закиси азота (N ₂ O) во вдыхаемой смеси, % | - | - | - | - | от 0 до 100 | | | | | | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемной доли закиси азота (N ₂ O) во вдыхаемой смеси, % - в диапазоне от 0 до 20 % включ. - в диапазоне св. 20 до 100 % | - | - | - | - | ±2 ±3 | | | | | | |

Таблица 3 - Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | «Сторм-Д1» | «Сторм-ДС1» | «Сторм-ДС2» | «Сторм-Д2» | «Сторм-Д3» | «Сторм-Д5» | «Сторм-Д6» | «Сторм-Д8» | «Сторм-ДС3» | «Сторм-ДС5» | «Сторм-ДС7» |
| Параметры электрического питания: – напряжение переменного тока, В – частота переменного тока, Гц | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 | 10 | 70 | 70 | 195 | 195 | 195 | 195 | 120 | 120 | 195 |
| Масса, кг, не более | 0,5 | 0,4 | 2,5 | 1,5 | 4,2 | 8 | 9 | 11 | 4,5 | 4,5 | 6 |

Продолжение таблицы 3

[illegible]

Знак утверждения типа

наносится на системы мониторинга в виде клеевой этикетки и на титульных листах Руководств по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|--|-------------------------------|--------|
| Основной блок с дисплеем в сборе (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Сетевой адаптер питания (для Д1) | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Зарядная установочная станция для портативного измерительного блока (для Д2) | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Зарядная установочная станция для портативной системы мониторинга (для ДС1) | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Сетевой адаптер питания зарядной установочной станции (для ДС1) | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Сетевой адаптер питания зарядной установочной станции EMS (для «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель питания («Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель питания/передачи данных (Д1) | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель заземления («Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Портативный мониторинговый блок EMS («Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Портативный мониторинговый блок MPS («Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль регистрации ЭКГ для основного блока («Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель ЭКГ на 3 отведения тип 2 («Сторм-ДС1») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель ЭКГ на 3 отведения тип 3 («Сторм-Д1») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|---|-------------------------------|--------|
| Кабель ЭКГ на 5 отведения тип 2 («Сторм-Д1») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель ЭКГ на 5 отведений тип 1 («Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель ЭКГ на 3 отведения тип 1 («Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель ЭКГ на 12 отведений («Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль SpO ₂ стандартный для основного блока («Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль SpO ₂ стандартный внешний («Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый датчик SpO ₂ (взрослый) (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый датчик SpO ₂ (детский) (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый датчик SpO ₂ (новорожденный) (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый силиконовый датчик SpO ₂ (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый датчик SpO ₂ (ушная клипса) (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель SpO ₂ («Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовый датчик SpO ₂ для новорожденных (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль Nellcor SpO ₂ для основного блока (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль Nellcor SpO ₂ внешний (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|---|-------------------------------|--------|
| Многоразовый датчик SpO ₂ Nellcor (универсальный) (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый датчик SpO ₂ Nellcor (взрослый) (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовый датчик SpO ₂ для новорожденных Nellcor (для «Сторм-ДС1», «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель SpO ₂ Nellcor («Сторм-Д3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль Masimo SpO ₂ для основного блока (для «Сторм-ДС2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль Masimo SpO ₂ внешний (для «Сторм-Д3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый датчик SpO ₂ Masimo (взрослый/ детский) (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый датчик SpO ₂ Masimo (новорожденный) (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовый датчик для новорожденных SpO ₂ Masimo (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель SpO ₂ Masimo (для «Сторм-Д3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль НИАД для основного блока (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Трубка НИАД (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором (стандартная) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором (для новорожденных) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором (детская) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|---|-------------------------------|--------|
| Манжета для измерения НИАД с коннектором (маленькая) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором (большая) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором (на бедро) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовая манжета для новорожденных (маленькая) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовая манжета для новорожденных (средняя) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовая манжета для новорожденных (большая) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Коннектор (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль НИАД Suntech (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором Suntech (стандартная) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Трубка НИАД Suntech (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором Suntech (для новорожденных) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором Suntech (детская) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором Suntech (маленькая) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|--|-------------------------------|--------|
| Манжета для измерения НИАД с коннектором Suntech (большая) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Манжета для измерения НИАД с коннектором Suntech (на бедро) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовая манжета для новорожденных Suntech (маленькая) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовая манжета для новорожденных Suntech (средняя) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Одноразовая манжета для новорожденных Suntech (большая) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль измерения температуры для основного блока (для «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль измерения температуры внешний (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Многоразовый универсальный накожный температурный датчик (для «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Ректальный /пищеводный температурный датчик (для «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль измерения EtCO ₂ в боковом потоке для основного блока (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль измерения EtCO ₂ в боковом потоке внешний (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль измерения EtCO ₂ Respironics внешний (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Датчик бокового потока CO ₂ тип 1 (LoFlo) (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Датчик бокового потока CO ₂ тип 2 (ISA) (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Воздушный адаптер CO ₂ тип 1 (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Воздушный адаптер CO ₂ тип 2 (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|--|-------------------------------|--------|
| Влагосборник (Фильтр Т3) (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Влагосборник (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Трубка СО ₂ одноразовая (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Адаптер трехсторонний (для «Сторм-Д1», «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль EtCO ₂ измерения в основном потоке внешний (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Датчик измерения СО ₂ в основном потоке тип 1 (IRMA) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Датчик измерения СО ₂ в основном потоке тип 2 (Capnostat) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель мультигазового модуля и модуля СО ₂ (IRMA/ISA) (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель мультигазового модуля и модуля СО ₂ (LoFlo/Capnostat) (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Адаптер дыхательный одноразовый (универсальный) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль мультигазового анализа (измерение в основном потоке) Phasein внешний (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Адаптер воздушный одноразовый универсальный (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Датчик измерения мультигаза в основном потоке (IRMA AX+) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Кабель мультигазового модуля и модуля СО ₂ (IRMA/ISA) (для ДС2, Д3, Д5, Д6, Д8, ДС3, ДС5, ДС7) | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Модуль мультигазового анализа (измерение в боковом потоке) внешний (ISA OR+) (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Линия пробозабора одноразовая с коннектором Luer-Lock (для «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|--|-------------------------------|--------|
| Аккумуляторная батарея перезаряжаемая для модуля EMS/MP5 (для «Сторм-Д2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея перезаряжаемая (для «Сторм-ДС2», «Сторм-Д3», «Сторм-Д5», «Сторм-Д6», «Сторм-Д8», «Сторм-ДС3», «Сторм-ДС5», «Сторм-ДС7») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея перезаряжаемая (для «Сторм-ДС1») | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 | 1 шт. |
| Методика поверки | МП-209-059-2018 | 1 шт. |

Поверка

осуществляется по документу МП-209-059-2018 «ГСИ. Система мониторинга физиологических показателей пациента «Сторм Д/ДС». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 06.09.2018 г.

Основные средства поверки:

- мера для поверки пульсовых оксиметров МППО-2М (рег. № 63897-16);
- генератор сигналов пациента ProSim 8 (рег. № 49808-12);
- термометр лабораторный электронный ЛТ-300 (рег. № 61806-15);
- устройство термостатирующее измерительное Термостат-А (рег. № 23837-02);
- СО состава искусственной газовой смеси на основе инертных и постоянных газов (ИП-М-1) состава $O_2 + N_2$, состава $CO_2 + \text{воздух}$, состава $N_2O + \text{воздух}$, состава $N_2O + N_2$ (ГСО 10531-2014);

- линейка измерительная металлическая почтовая (рег. № 52137-12)
- термогигрометр ИВА-6, модификация ИВА-6Н-КП-Д (рег. № 46434-11).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или на СИ, как указано на рисунке 2.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе мониторинга физиологических показателей пациента «Сторм Д/ДС»

ТУ 26.60.12-026-74487176-2017 Система мониторинга физиологических показателей пациента «Сторм Д/ДС». Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИОН» (ООО «ДИКСИОН»)
ИНН 7713536527
Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, помещ. I, комн. 2Б
Адрес места производства: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2
Телефон/факс: +7 (495) 185-19-17
Web-сайт: www.dixon.ru
E-mail: info@dixon.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон/факс: +7 (812) 251-76-01/+7 (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2019 г.