

СОГЛАСОВАНО
Директор УП «КАРДИАН»



В.П.Крупенин

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
руководитель Центра эталонов,
поверки и калибровки БелГИМ



А.С.Вольнец

2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ №1 МРБ МП.2310-2013

СИСТЕМА ДЛИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ «КАРДИАН-СДМ»

Методика поверки

Разработчик:

Главный инженер УП «КАРДИАН»

А.А.Елинский

«23» 06 2022 г.



В.П.Крупенин

2022 г.

2022

УП «КАРДИАН»		ИЗВЕЩЕНИЕ № 1		ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА МРБ МП.2310-2013	
Дата выпуска		Срок изменения		Лист 2	Листов 2
ПРИЧИНА		Актуализация ТНПА			код —
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ					
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ					
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ					
РАЗОСЛАТЬ					
ПРИЛОЖЕНИЕ		На 23 листах			
ИЗМ.					
1					

Наименование МП изложить в редакции: СИСТЕМЫ ДЛИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ «КАРДИАН-СДМ»

Лист 2-21 заменить.
Выпущены листы 22-24

Составил	Захарченко		Согласовал	Крупенин	
Проверил	Елинский		Н.контр.	Казеко	
Изменение внес					



Настоящая методика поверки (далее – МП) распространяется на системы длительного мониторингирования электрокардиограмм и артериального давления (ЭКГ и АД) «КАРДИАН-СДМ» (далее – системы), изготавливаемые по [1], производства УП «КАРДИАН», и устанавливает методы и средства их поверок.

Системы состоят из монитора ЭКГ и АД, являющегося рабочей частью системы, и программно-аппаратного комплекса, состоящего из программного обеспечения, которое устанавливается на персональный компьютер (далее – ПЭВМ).

Обязательные метрологические требования, предъявляемые к системам, приведены в приложении А.

Настоящая МП разработана в соответствии с [2].

1 Нормативные ссылки

В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ТКП 427-2022 Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации;

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

Примечание – При пользовании настоящей МП целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящей МП следует руководствоваться замененными (измененными) документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки систем

Наименование операции поверки	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	последующей поверке
1	2	3	4
1 Внешний осмотр	8.1	Да	Да
2 Опробование	8.2	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик:			
3.1 Определение диапазона входных напряжений	8.3.1	Да	Да
3.2 Определение относительной погрешности измерения напряжения	8.3.2	Да	Да
3.3 Определение относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала	8.3.3	Да	Да
3.4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)	8.3.4	Да	Нет
3.5 Определение входного импеданса	8.3.5	Да	Нет
3.6 Определение постоянной времени	8.3.6	Да	Да
3.7 Определение относительной погрешности измерения интервалов времени	8.3.7	Да	Нет
3.8 Определение диапазона измерения давления и абсолютной погрешности измерения давления	8.3.8	Да	Да
3.9 Определение коэффициента ослабления синфазных сигналов	8.3.9	Да	Да

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		2
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Окончание таблицы 1


1	2	3	4
3.10 Определение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу	8.3.10	Да	Да
3.11 Определение постоянного тока в цепи пациента	8.3.11	Да	Да
3.12 Определение скорости снижения давления в манжете	8.3.12	Да	Да
Примечание – Если при проведении той или иной операции поверки получают отрицательный результат, поверку прекращают			

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта МП	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики
1	2
8.2.1, 8.2.2; 8.3.1 – 8.3.7; 8.3.9; 8.3.10	Генератор сигналов функциональный ГФ-05, диапазон частот от 0,01 Гц до 600,00 Гц; погрешность установки частоты $\pm 0,5$ %; диапазон размаха напряжения выходного сигнала от 0,03 мВ до 10,00 В, относительная погрешность напряжения входного сигнала: $\pm 1,0$ % для 1 мВ; $\pm 1,5$ % для 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 мВ; $\pm 3,0$ % для 0,1; 0,2 мВ; $\pm 9,5$ % для 0,03; 0,05 мВ; относительная погрешность установки значений частоты в пределах $\pm 0,1$ %
8.3.5	Блок проверки электрокардиографов БПП-1 (далее – блок БПП-1), сопротивление между входом и выходом: минимальное сопротивление между входом и выходом 100 кОм с пределами ± 5 %; максимальное сопротивление между входом и выходом 150 кОм с пределами ± 5 %; 2300 кОм с пределами ± 10 %
8.3.9; 8.3.10	Блок проверки электрокардиографов БПП-2 (далее – блок БПП-2), сопротивление между входом и выходом: а) по входу N – (51,00 $\pm$ 2,55) кОм; б) по входу R – $R_{\min}$ – (50,00 $\pm$ 2,50) Ом, $R_{\max}$ – (51,00 $\pm$ 2,55) кОм; в) по остальным каналам $R_{\min}$ не более 0,50 Ом; г) $R_{\max}$ – (51,00 $\pm$ 2,55) кОм
8.3.11	Блок проверки электрокардиографов БПП-3 (далее – блок БПП-3), сопротивление между входом и выходом (по всем каналам): минимальное сопротивление между входом и выходом 100 Ом с пределами ± 5 %; максимальное сопротивление между входом и выходом 10,1 кОм с пределами ± 10 %
8.2.5	Мегаомметр Ф 4102/1-1М, диапазон измерений сопротивления изоляции, значения напряжения на зажимах прибора при разомкнутой внешней цепи и участки диапазонов с относительной погрешностью, не превышающей 15 - 30%: диапазон измерений сопротивления изоляции, не менее, МОм: от 0 до 30, от 0 до 2000 при значениях напряжения 100 $\pm$ 5 В; от 0 до 150, от 0 до 10000 при значениях напряжения 500 $\pm$ 25 В; от 0 до 300, от 0 до 20000 при значениях напряжения 1000 $\pm$ 50 В; класс точности: 1,5; предел допускаемой основной погрешности равен $\pm 1,5$ % от длины шкалы
8.2.3; 8.2.4; 8.3.8	Манометр цифровой ХР2i (далее – манометр), пределы допускаемой основной погрешности: $\pm 0,25$ % в диапазоне измерения давления от минус 100 до 0 кПа; $\pm 0,02$ % в диапазоне измерения давления от 0 до 20 кПа; $\pm 0,10$ % в диапазоне измерения давления от 20 до 100 кПа
8.2.4, 8.3.12	Секундомер механический СОСпр, класс точности: 3
6.1	Барометр М-67, диапазон измерения давления от 610 до 790 мм рт. ст., пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления $\pm 0,8$ мм рт. ст.

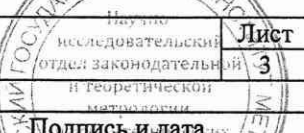1	Зам				МРБ МП.2310–2013		Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата			3
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №			Инв. № дубл.



Окончание таблицы 2

1	2
6.1	Термогигрометр ИВА-6Б2, диапазон измерений относительной влажности от 0 % до 98 %; диапазон измерений температуры от минус 20 °С до плюс 60 °С; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности ± 2 %, пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне от 0 °С до плюс 60 °С - $\pm 0,5$ %, в диапазоне от минус 20 °С до 0 °С - $\pm 1,0$ %
8.2.3; 8.2.4; 8.3.8	Цилиндр, диаметр от 90 до 100 мм, высота от 200 до 300 мм
Примечания 1 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых систем с требуемой точностью. 2 Все средства измерений должны иметь действующие знаки поверки (калибровки) и (или) свидетельства о поверке (калибровке).	

3.2 При проведении поверки системы используется компьютер с минимальной конфигурацией:

- процессор с тактовой частотой не ниже 600 МГц;
- ОЗУ не менее 32 Мб;
- Windows XP;
- манипулятор «Мышь»;
- принтер;
- Bluetooth адаптер ПЭВМ;
- тестовая программа ПЭВМ для проведения поверки Test_Cardian.exe;
- медицинская программа Cardian_SDM.exe.

4 Требования к квалификации поверителей

К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих необходимую квалификацию в области обеспечения единства измерений.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные в ТКП 181, ТКП 427, а также указания по безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на поверяемые системы [3], применяемые вспомогательное оборудование и эталоны.

5.2 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано установками пожарной сигнализации и пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

6 Условия поверки

6.1 При проведении поверки систем должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха, °С	от 15 до 25;
относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80;
атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,0.

7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- необходимо выдержать систему в нерабочем состоянии в условиях, изложенных в разделе 6 не менее 2 ч;

- эталонные средства измерений должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

7.2 Система должна поступить на поверку в исправном и работоспособном состоянии.

1	Зам				МРБ МП.2310-2013	Лист 4
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

7.3 Перед началом поверки поверитель должен изучить эксплуатационные документы поверяемой системы, эталонов и вспомогательных средств поверки, настоящую МП, правила техники безопасности.

8 Проведение проверки

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие системы следующим требованиям:

- система должна быть укомплектована в соответствии с эксплуатационной документацией [3];
- элементы питания вставлены с соблюдением полярности в отсек питания монитора ЭКГ и АД;
- система не должна иметь механических повреждений, мешающих работе и (или) влияющих на точность проводимых с ее помощью измерений;
- на системе должен быть нанесен товарный знак изготовителя, наименование прибора, заводской номер и год выпуска.

8.1.2 Система должна соответствовать всем требованиям 8.1.1.

8.2 Опробование

8.2.1 Для идентификации программного обеспечения запускают тестовую программу ПЭВМ для проведения поверки Test_Cardian.exe и сравнивают версию программы, указанную в интерфейсе программы с номером версии программы, указанным в описании типа. Затем запускают медицинскую программу Cardian_SDM.exe. В верхнем меню выбирают вкладку «Помощь», затем вкладку «О программе» и сравнивают версию программы с номером версии, указанным в описании типа.

8.2.2 Проверка достоверности работы измерительной части тестовой программы для проведения поверки

Для проверки достоверности работы измерительной части тестовой программы включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение относительной погрешности калибровочного сигнала».

Подают на вход системы меандр частотой $(10,0 \pm 0,2)$ Гц и размахом $(2,000 \pm 0,015)$ мВ длительностью не менее 200 мс.

Считывают с экрана ПЭВМ отличие размаха регистрируемого сигнала внутреннего калибратора от размаха регистрируемого внешнего сигнала. Погрешность должна находиться в интервале (100 ± 5) %.

8.2.3 Проверка функционирования при регистрации электрокардиосигнала

Опробование при регистрации электрокардиосигнала проводят в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б.

На вход поверяемой системы с выхода генератора сигналов функционального ГФ-05 подают тестовый кардиосигнал размахом $(1,0 \pm 0,1)$ мВ, частотой $(1,00 \pm 0,02)$ Гц.

Включают ПЭВМ, запускают программу Cardian_SDM.exe, выбирают в меню программы режим «Новый пациент». Заполняют карточку пациента. Нажимают на кнопку «Ввод», при этом на мониторе системы должен отображаться тестовый кардиосигнал в реальном масштабе времени.

1	Зам				МРБ МП.2310-2013		Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата			5
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	



Затем подключают USB кабель, выбирают режим «Прием данных» и производят чтение информации, записанной в память монитора системы. В меню программы нажимают «Анализ» и проверяют записанные данные электрокардиосигнала.

Результаты считаются удовлетворительными, если регистрируемый сигнал не имеет видимых искажений.

8.2.4 Проверка функционирования при измерении артериального давления

Опробование при измерении артериального давления проводят в соответствии со схемой, приведенной на рисунке В.1 приложения В.

Подключают внутренний источник питания и включают систему. На мониторе системы должно появиться отображение текущего времени «ЧЧ:ММ», система исправна и готова к работе.

Включают ПЭВМ, запускают программу Cardian_SDM.exe, выбирают в меню программы режим «Новый пациент». Заполняют карточку пациента. Нажимают на кнопку «Ввод».

После нажимают на мониторе системы кнопку «СТАРТ/СТОП» и проводят несколько измерений артериального давления в автоматическом режиме.

Затем подключают USB кабель, выбирают режим «Прием данных» и производят чтение информации, записанной в память монитора системы. В меню программы нажимают «Анализ» и проверяют записанные данные артериального давления.

Если при опробовании не происходит сбой, то система работоспособна и готова к дальнейшей проверке.

8.2.5 Проверка функционирования режима ускоренной декомпрессии

Опробование режима ускоренной декомпрессии проводят по схеме, приведенной на рисунке Г.1 приложения Г.

Подключают внутренний источник питания и включают систему. На мониторе системы должно появиться отображение текущего времени «ЧЧ:ММ», система исправна и готова к работе.

Необходимо убедиться, что на пневматическом входе монитора системы отсутствует избыточное давление. Переводят монитор системы в режим «Манометр», для этого нажимают и удерживают кнопку «СТАРТ/СТОП» до появления меню на мониторе системы. Далее выбирают однократными нажатиями пункт меню «Режим «Манометр», нажимают и удерживают кнопку до появления индикации давления.

С помощью пневматического нагнетателя создают в пневмосистеме избыточное давление более 280 мм рт. ст. и проверяют режим ускоренной декомпрессии монитора системы. Для этого полностью открывают его пневмоклапан путем нажатия кнопки «СТАРТ/СТОП», запустив одновременно секундомер, и контролируют в пневмосистеме изменение давления.

Время сброса давления в пневмосистеме от 280 до 15 мм рт. ст. должно быть не более 10 с.

8.2.6 Проверка электрического сопротивления изоляции

Электрическое сопротивление изоляции измеряют между корпусом монитора системы и кабелем отведений при испытательном напряжении постоянного тока 500 В. Отсчет величины сопротивления производят по мегаомметру. Измерение производится однократно. Величина электрического сопротивления изоляции должна быть не менее 7 МОм.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Определение диапазона входных напряжений

Определение диапазона входных напряжений проводят в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б.

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	исследовательский и теоретический метрологический научно-технический Лист 6
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	



Включают систему, которая должна находиться в поле действия адаптера Bluetooth ПЭВМ. Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение диапазона входных напряжений». На вход монитора системы подают гармонический сигнал размахом $(30,0 \pm 3,0)$ мкВ частотой $(10,0 \pm 0,2)$ Гц. Форма изображения сигнала на экране ПЭВМ не должна иметь искажений. Затем подают гармонический сигнал размахом $(5,00 \pm 0,15)$ мВ. Форма сигнала на экране ПЭВМ не должна иметь видимых искажений.

Заключение о подтверждении диапазона входных напряжений считают положительным, если регистрируемый сигнал не имеет видимых искажений.

8.3.2 Определение относительной погрешности измерения напряжения

Определение относительной погрешности измерения напряжения проводят при помощи генератора сигналов функционального ГФ-05 в каждом канале в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б.

Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardin.exe, выбирают в меню программы режим «Определение погрешности измерения напряжения». По командам тестовой программы последовательно подают на вход системы меандр частотой $(10,0 \pm 0,2)$ Гц размахом 0,1; 0,5; 4,0 мВ. На вход системы одновременно подают постоянное напряжение в диапазоне от минус 300 до 300 мВ.

Считывают с экрана ПЭВМ значение относительной погрешности измерения напряжения δ_u , %, вычисленное по формуле

$$\delta_u = \frac{U_{изм} - U_{вх}}{U_{вх}} \cdot 100, \quad (1)$$

где $U_{изм}$ – значение напряжения, измеренное системой, мВ;

$U_{вх}$ – значение напряжения, установленное на выходе генератора сигналов функционального ГФ-05, мВ.

Значения относительной погрешности измерения напряжения, вычисленной по формуле (1), должны находиться в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.1 приложения Ж.

8.3.3 Определение относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала

Определение относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала проводят регистрацией внешнего сигнала и сравнением его с внутренним калибровочным сигналом в каждом канале в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б.

Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение относительной погрешности калибровочного сигнала».

Поддают на вход системы меандр частотой $(10,0 \pm 0,2)$ Гц и размахом $(1,000 \pm 0,015)$ мВ длительностью не менее 200 мс.

Считывают с экрана ПЭВМ отличие размаха регистрируемого сигнала внутреннего калибратора от размаха регистрируемого внешнего сигнала $\delta_{ук}$, %, вычисленного по формуле

$$\delta_{ук} = \frac{h_B - h_k}{h_k} \cdot 100, \quad (2)$$

где h_k – размах сигнала внутреннего калибратора, мВ;

h_B – размах регистрируемого внешнего сигнала, мВ.

Значения относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала, вычисленной по формуле (2), должны находиться в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.2 приложения Ж.

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



8.3.4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики

Определение неравномерности АЧХ проводят при помощи генератора сигналов функционального ГФ-05 в каждом канале в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б.

На вход системы подают гармонический сигнал частотой $(10,0 \pm 0,2)$ Гц размахом $(1,000 \pm 0,015)$ мВ. Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики».

Регистрируют размах сигнала h_0 , затем по командам тестовой программы последовательно подают на вход системы сигналы частотой 0,5; 10,0; 40,0; 50,0; 60,0; 75,0; 100,0 Гц.

Считывают с экрана ПЭВМ значение неравномерности АЧХ в полосе частот от 0,5 Гц до 60,0 Гц включительно и свыше 60,0 Гц до 100,0 Гц, %, вычисленное по формуле

$$\delta_f = \frac{h_{\max} - h_0}{h_0} \cdot 100, \quad (3)$$

где $h_{\max}$ – линейный размер размаха изображения сигнала синусоидальной формы, максимально отличающийся от h_0 в положительную и отрицательную стороны, мм;

h_0 – линейный размер размаха изображения сигнала синусоидальной формы на опорной частоте 10,0 Гц, мм.

Значения неравномерности амплитудно-частотной характеристики, вычисленной по формуле (3), должны находиться в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.3 приложения Ж.

8.3.5 Определение входного импеданса

Определение входного импеданса $Z_{\text{вх}}$ проводят в каждом канале в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б при подаче на проверяемый вход системы постоянного напряжения в диапазоне от минус 300 до 300 мВ.

Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение входного импеданса». На вход системы подают гармонический сигнал частотой $(10,0 \pm 0,2)$ Гц и размахом $(2,00 \pm 0,06)$ мВ при замкнутом переключателе П1 блока БПП1 (т.е. без последовательного импеданса Z_2) и измеряют размах сигнала H_{u1} . При том же входном сигнале размыкают переключатель П1 блока БПП1 и измеряют размах сигнала H_{u2} . Считывают с экрана ПЭВМ значение входного импеданса $Z_{\text{вх}}$, МОм, вычисленного автоматически по формуле

$$Z_{\text{вх}} = Z_2 \cdot \left| \frac{H_{u2}}{H_{u1} - H_{u2}} \right|, \quad (4)$$

где H_{u1} – линейный размер размаха регистрируемого сигнала без последовательно включенного импеданса Z_2 , в мм;

H_{u2} – линейный размер размаха регистрируемого сигнала при последовательно включенном импедансе Z_2 , в мм;

Z_2 – значение последовательно включенного импеданса, которое должно быть не менее $1/3 Z_{\text{вх}}$ (10,0 МОм), установленного в ТУ на данный прибор.

Значения входного импеданса, вычисленного по формуле (4), должны находиться в пределах значения, приведенного в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.4 приложения Ж.

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	Лист 8
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	



8.3.6 Определение постоянной времени

Постоянную времени определяют при помощи генератора сигналов функционального ГФ-05 в каждом канале в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б.

На вход системы подают сигнал прямоугольной формы размахом $(4,00 \pm 0,12)$ мВ частотой $(0,100 \pm 0,002)$ Гц. Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение постоянной времени».

Постоянную времени определяют с помощью программы как время затухания регистрируемого сигнала до уровня 0,37 без учета выброса.

Значения постоянной времени должны находиться в пределах значения, приведенного в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.5 приложения Ж.

8.3.7 Определение относительной погрешности измерения интервалов времени

Определение относительной погрешности измерения интервалов времени определяют при помощи генератора сигналов функционального ГФ-05 в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б.

Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение относительной погрешности измерения интервалов времени». По командам тестовой программы на вход системы подают прямоугольный сигнал размахом $(0,50 \pm 0,03)$ мВ и частотой следования $f_{обр}$, равной 1,0; 2,0; 10,0 Гц с пределами $\pm 0,5$ %. С помощью тестовой программы измеряют период входного сигнала $T_{изм}$.

Считывают с экрана ПЭВМ значение относительной погрешности измерения интервалов времени δ_t , %, рассчитанной автоматически по формуле

$$\delta_t = \frac{T_{изм} - T_{обр}}{T_{обр}} \cdot 100, \quad (5)$$

где $T_{изм}$ – значение периода входного сигнала, измеренного системой, с;

$T_{обр}$ – значение периода сигнала, установленного на генераторе, с, вычисленное по формуле

$$T_{обр} = \frac{1}{f_{обр}}, \quad (6)$$

где $f_{обр}$ – значение частоты следования сигнала, установленного на выходе генератора сигналов функционального ГФ-05, Гц.

Значения относительной погрешности измерения интервалов времени, вычисленной по формуле (5), должны находиться в пределах значения, приведенного в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.6 приложения Ж.

8.3.8 Определение диапазона измерения давления и абсолютной погрешности измерения давления в манжете

Диапазон измерения давления и абсолютную погрешность измерения давления в манжете определяют в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Г.1 приложения Г.

Подключают внутренний источник питания и включают монитор системы. На мониторе системы должно появиться отображение текущего времени «ЧЧ:ММ», система исправна и готова к работе.

Необходимо убедиться, что на пневматическом входе монитора системы отсутствует избыточное давление.

1	Зам				МРБ МП.2310–2013		
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата			
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	



Переводят монитор системы в режим «Манометр», путем нажатия и удержания кнопки «СТАРТ/СТОП» до появления меню на мониторе системы. Далее выбирают однократными нажатиями пункт меню «Режим «Манометр», затем нажимают и удерживают кнопку до появления индикации давления.

Ручным пневматическим нагнетателем накачивают воздух в манжету до тех пор, пока показания на мониторе системы будут больше 280 мм рт. ст. Медленно стравливают давление при помощи клапана на ручном нагнетателе. При достижении на образцовом манометре значения 280 мм рт. ст. стравливание прекращают и фиксируют показания на мониторе системы. Погрешность измерения давления определяют, как разность показаний монитора системы и образцового манометра. По описанной выше методике проводят поверку не менее чем в шести точках, равномерно распределенных в диапазоне измерений.

Диапазон измерения давления и абсолютная погрешность измерения давления в манжете должны находиться в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.7 приложения Ж.

8.3.9 Определение коэффициента ослабления синфазных сигналов

Определение коэффициента ослабления синфазных сигналов K_c проводят в каждом канале в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Д.1 приложения Д.

От генератора сигналов функционального ГФ-05 подают гармонический сигнал частотой $(50,0 \pm 2,5)$ Гц, имеющий среднеквадратичное значение напряжения $(20,0 \pm 0,6)$ В. Емкость С2 блока БПП2 регулируют таким образом, чтобы суммарная емкость $C2+C1$ равнялась С3, что соответствует установлению напряжения на клемме А БПП2 равным $(10,0 \pm 1,0)$ В. Это условие проверяют на частоте сигнала $(5,0 \pm 0,5)$ кГц при отключенном приборе вольтметром с входным импедансом не менее 2,0 МОм.

При проверке K_c допускается подача сигнала меньшего напряжения (на клемме А устанавливают напряжение, равное половине подаваемого от генератора сигналов функционального ГФ-05) при условии, что максимальный сигнал будет замечен при регистрации.

Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение коэффициента ослабления синфазных сигналов».

Регистрируют сигнал на частоте 50,0 Гц последовательно по всем каналам, размыкая поочередно переключатель П1 блока БПП2, оставляя остальные переключатели в замкнутом положении.

Проверку проводят при одновременной подаче постоянного напряжения в диапазоне от минус 300 до 300 мВ на соответствующий вход проверяемого канала.

Считывают с экрана ПЭВМ значение коэффициента ослабления синфазных сигналов K_c , дБ, для максимального зарегистрированного сигнала, рассчитанного автоматически по формуле

$$K_c = 20 \lg \frac{U_c}{U_{изм}}, \quad (7)$$

где U_c – размах напряжения в точке А при отключенном кабеле монитора, В;

$$U_c = 2\sqrt{2} \cdot 10, \quad (8)$$

$U_{изм}$ – размах сигнала, зарегистрированного системой, В.

Значения коэффициента ослабления синфазных сигналов, вычисленного по формуле (7), должны находиться в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.8 приложения Ж.

1	Зам				МРБ МП.2310-2013		Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата			10
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	



8.3.10 Определение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу

Определение уровня напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу, проводят в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Д.1 приложения Д.

Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу».

Заземляют точку А и размыкают переключатели П1 блока БПП2, затем регистрируют сигнал в течение 10 с синхронно по всем каналам и измеряют его размах. Считывают с экрана ПЭВМ значения внутренних шумов, приведенных ко входу, $U_{ш}$, мкВ.

Значения напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу, должны находиться в пределах значения, приведенного в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.9 приложения Ж.

8.3.11 Определение постоянного тока в цепи пациента

Определение постоянного тока в цепи пациента определяют в соответствии со схемой, приведенной на рисунке Е.1 приложения Е.

Включают ПЭВМ, запускают тестовую программу Test_Cardian.exe, выбирают в меню программы режим «Определение постоянного тока в цепи пациента».

Размыкают переключатели П1 блока БПП3, регистрируют и измеряют размах опорного уровня H_0 в каждом канале, затем замыкают переключатели П1 блока БПП3, регистрируют и измеряют размах текущего сигнала H_1 в каждом канале.

Считывают с экрана ПЭВМ значение постоянного тока I , мкА, в цепи пациента, вычисленное автоматически по формуле

$$I = \frac{H_0 - H_1}{Z_{\phi}}, \quad (9)$$

где H_0 – размах опорного сигнала, мВ;

H_1 – размах сигнала с включенным Z_{ϕ} , мВ;

Z_{ϕ} – сопротивление стенда, кОм, $Z_{\phi}=10$ кОм.

Значения постоянного тока в цепи пациента должны находиться в пределах значения, приведенного в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в таблице Ж.10 приложения Ж.

8.3.12 Определение скорости снижения давления в манжете

Скорость снижения давления в манжете проверяют в рабочем режиме измерения артериального давления.

Подключают внутренний источник питания и включают монитор системы. На мониторе системы должно появиться отображение текущего времени «ЧЧ:ММ», система исправна и готова к работе.

Необходимо убедиться, что на пневматическом входе монитора системы отсутствует избыточное давление. Переводят монитор системы в режим «Кнопка», нажимая и удерживая кнопку «СТАРТ/СТОП» до появления меню на мониторе системы. Далее выбирают однократными нажатиями пункт меню «Режим «Кнопка», затем нажимают и удерживают кнопку до появления мониторинга ЭКГ функциональной пробы.

По окончании инициализации нажимают кнопку «СТАРТ/СТОП». После окончания работы компрессора через 5 с определяют скорость снижения давления в манжете считыванием двух показаний P_1 и P_2 с интервалом времени 10 с, отсчитываемых по секундомеру.

1	Зам				МРБ МП.2310–2013
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата	
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.



Скорость снижения давления в манжете V_c , мм рт. ст./с рассчитывается по формуле

$$V_c = \frac{P_1 - P_2}{10}, \quad (10)$$

где P_1 – показания давления поверяемой системы в момент включения секундомера, мм рт. ст.;

P_2 – показания давления поверяемой системы через 10 с, мм рт. ст.

Значение скорости снижения давления в манжете должно находиться в пределах значений, приведенных в таблице А.1 приложения А.

Результаты регистрируют в пункте Ж.3.12 приложения Ж.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена в приложении Ж.

9.2 При положительных результатах поверки системы на монитор ЭКГ и АД, входящий в состав системы, наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке по форме, установленной в [4].

9.3 При отрицательных результатах первичной поверки системы выдают заключение о непригодности по форме, установленной в [4].

При отрицательных результатах последующей поверки системы выдают заключение о непригодности по форме, установленной в [4], ранее нанесенный знак поверки подлежит уничтожению путем приведения его в состояние, непригодное для дальнейшего применения, предыдущее свидетельство прекращает свое действие.

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



Приложение А
(обязательное)
Обязательные метрологические требования

Таблица А.1 – Обязательные метрологические требования

Наименование	Значение
1	2
Диапазон входных напряжений, мВ	от 0,1 до 4,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, %:	
в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ включительно	± 15
в диапазоне свыше 0,5 до 4,0 мВ	± 7
Пределы допускаемой относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала, %	± 5
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, %:	
в диапазоне от 0,5 до 60 Гц включительно	от минус 10 до плюс 5
в диапазоне свыше 60 до 100 Гц	от минус 30 до плюс 5
Входной импеданс, МОм, не менее	10
Постоянная времени, с, не менее	3,2
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов времени в диапазоне от 0,1 до 1,0 с, %	± 2
Диапазон измерения давления, мм рт. ст.	от 20 до 280
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления, мм рт. ст.	± 3
Коэффициент ослабления синфазных сигналов, дБ, не менее	100
Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу, мкВ, не более	20
Постоянный ток в цепи пациента, мкА, не более	0,1
Диапазон средней скорости снижения давления в манжете, мм рт. ст./с	от 2 до 5

1	Зам				МРБ МП.2310-2013	Лист 13
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	



Приложение Б
(обязательное)

Схема опробования при регистрации электрокардосигнала, определения диапазона входных напряжений, определения относительной погрешности измерения напряжения, определение относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала, определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики, определение входного импеданса, определение постоянной времени, определение относительной погрешности измерения интервалов времени

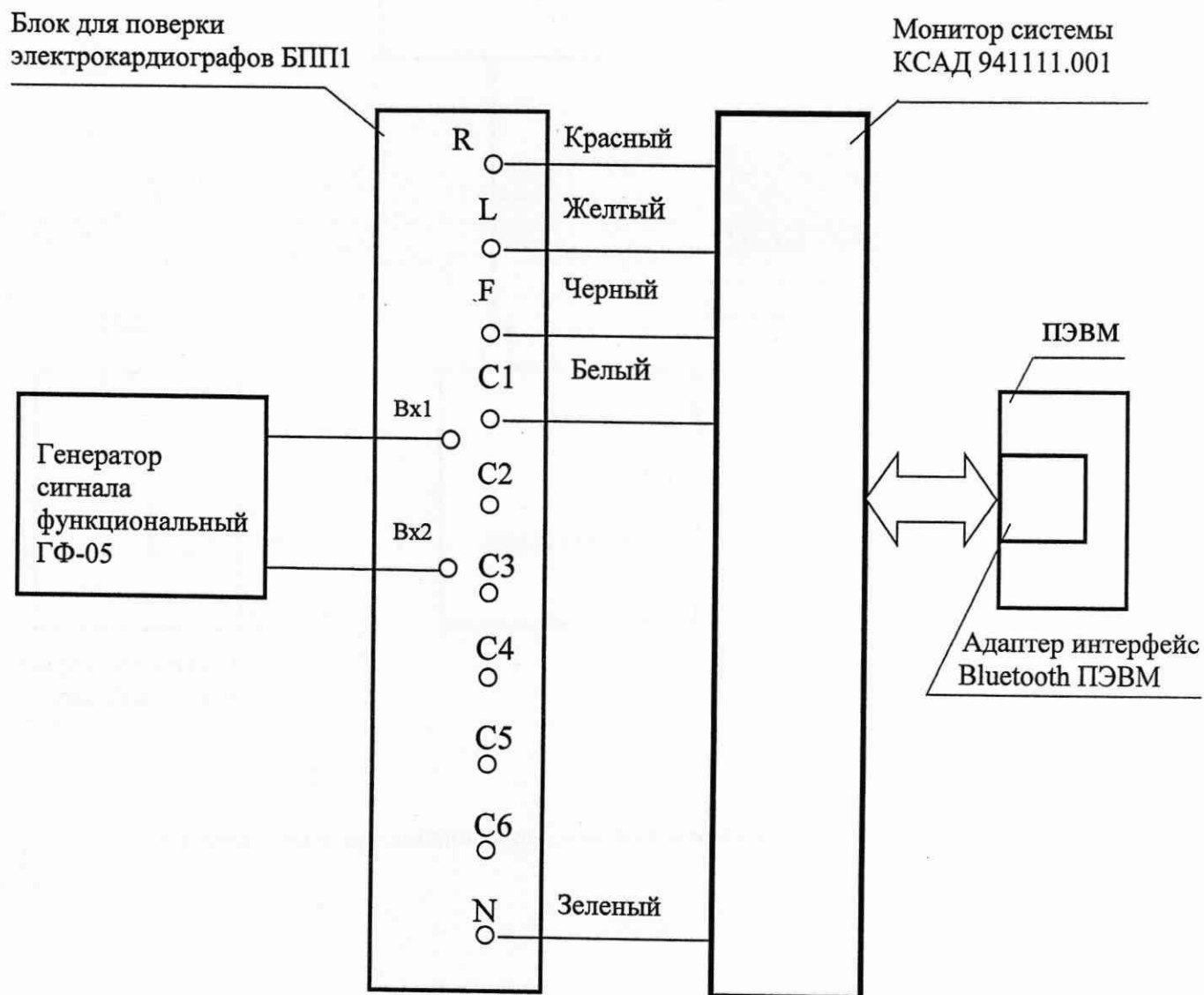


Рисунок Б.1 – Схема опробования при регистрации электрокардосигнала, определения диапазона входных напряжений, определения относительной погрешности измерения напряжения, определение относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала, определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики, определение входного импеданса, определение постоянной времени, определение относительной погрешности измерения интервалов времени

1	Зам				МРБ МП.2310–2013			
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата				Лист 14
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		



Приложение В
(обязательное)
Схема опробования при измерении АД

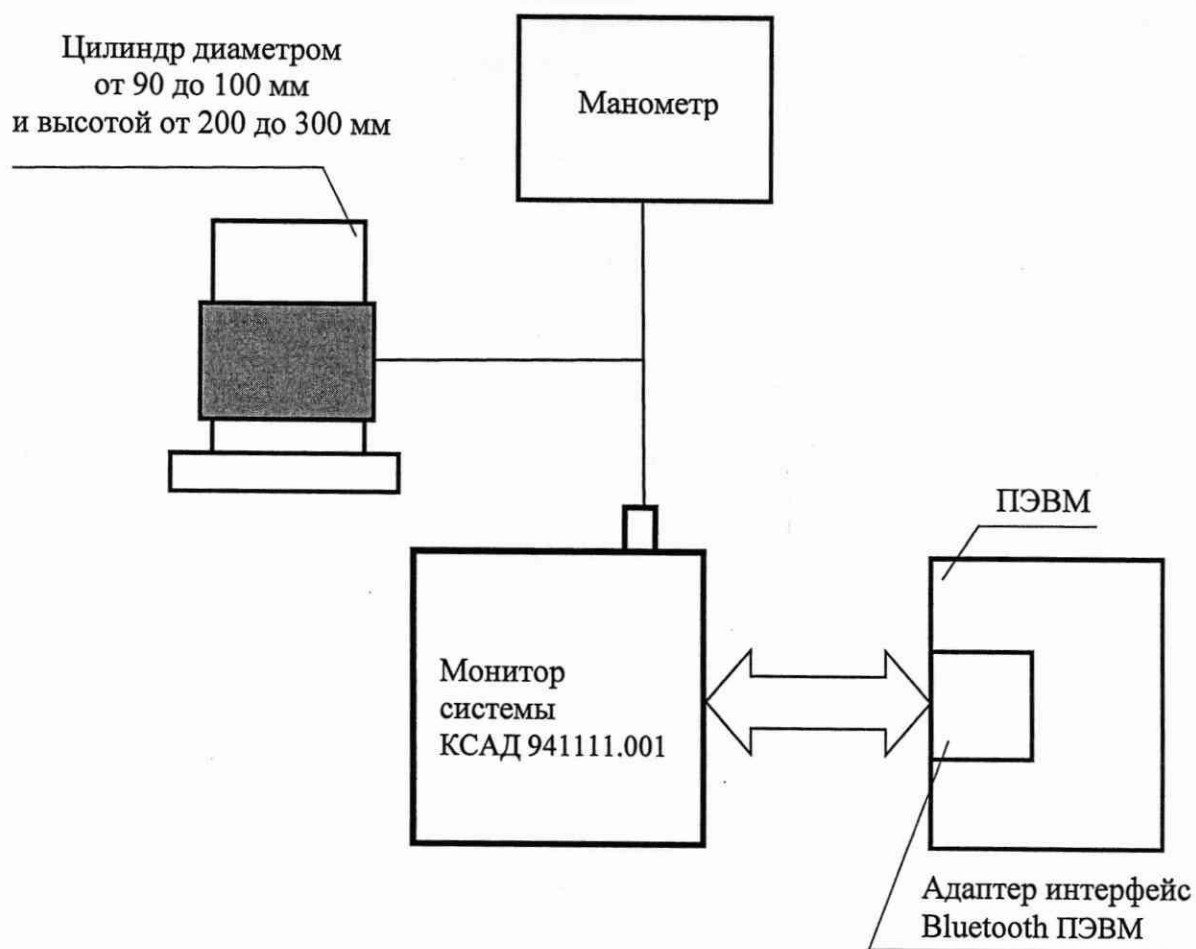


Рисунок В.1 – Схема опробования при измерении АД

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	Исследовательский отдел законодательства и теоретических метрологии научно-технических исследований	Лист 15
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата			
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.		



Приложение Г
(обязательное)

Схема опробования режима ускоренной декомпрессии, определения диапазона измерения давления и погрешности измерения давления

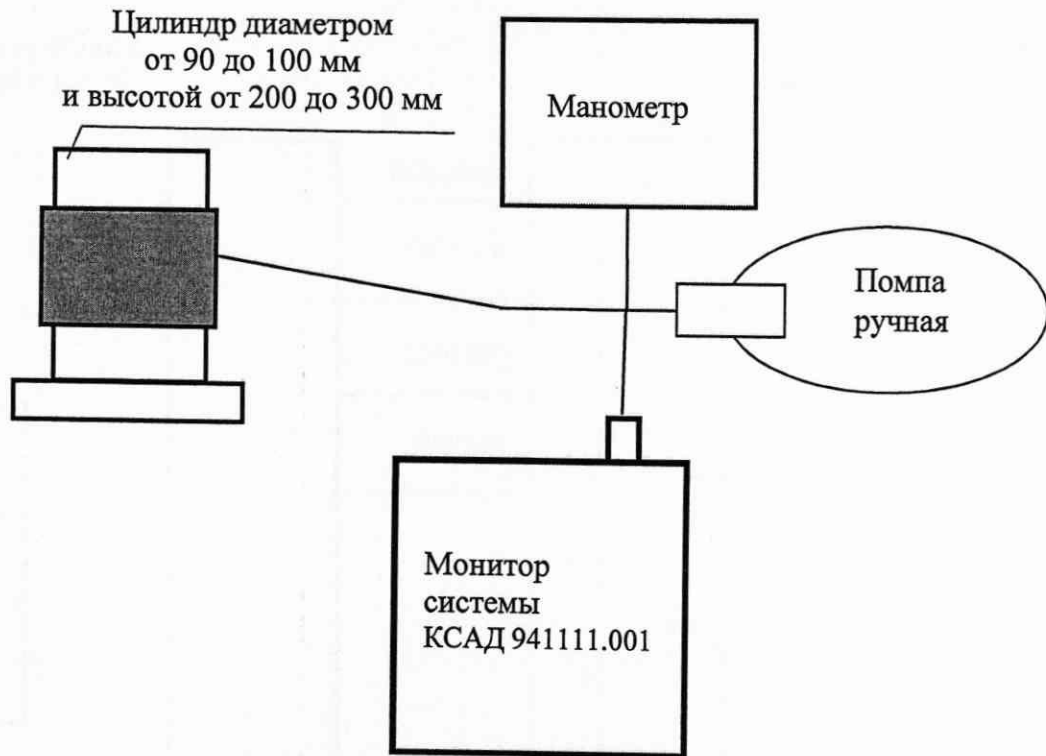


Рисунок Г.1 – Схема опробования режима ускоренной декомпрессии, определения диапазона измерения давления и погрешности измерения давления



1	Зам				МРБ МП.2310-2013			Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата				16
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		

Приложение Д
(обязательное)

Схема определения коэффициента ослабления синфазных сигналов и напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу

Блок для поверки
электрокардиографов БПП2

Монитор системы
КСАД 941111.001

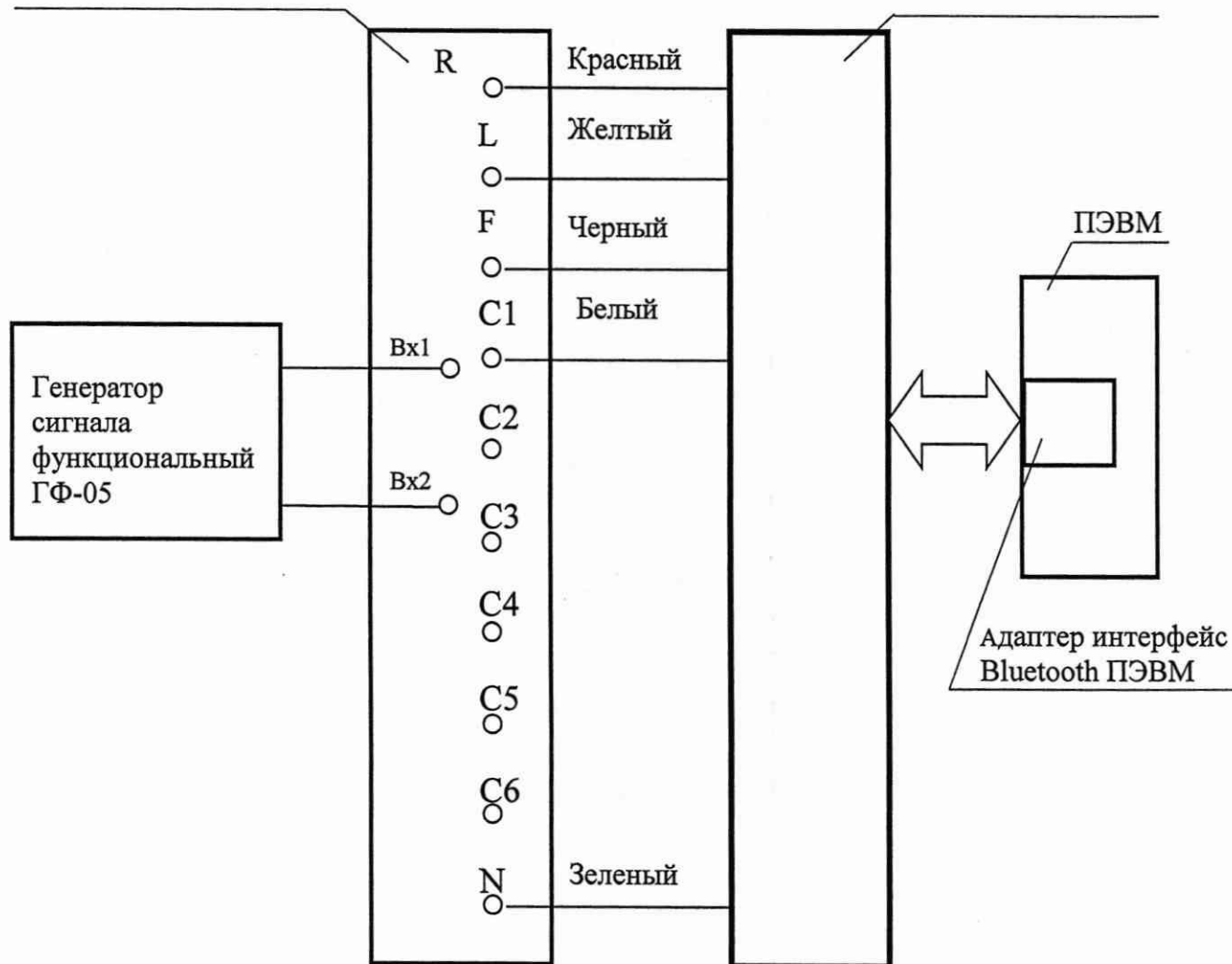


Рисунок Д.1 – Схема определения коэффициента ослабления синфазных сигналов и напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу

1	Зам				МРБ МП.2310-2013			Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата				17
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата



Приложение Е
(обязательное)
Схема определения постоянного тока в цепи пациента

Блок для поверки
электрокардиографов БППЗ

Монитор системы
КСАД 941111.001

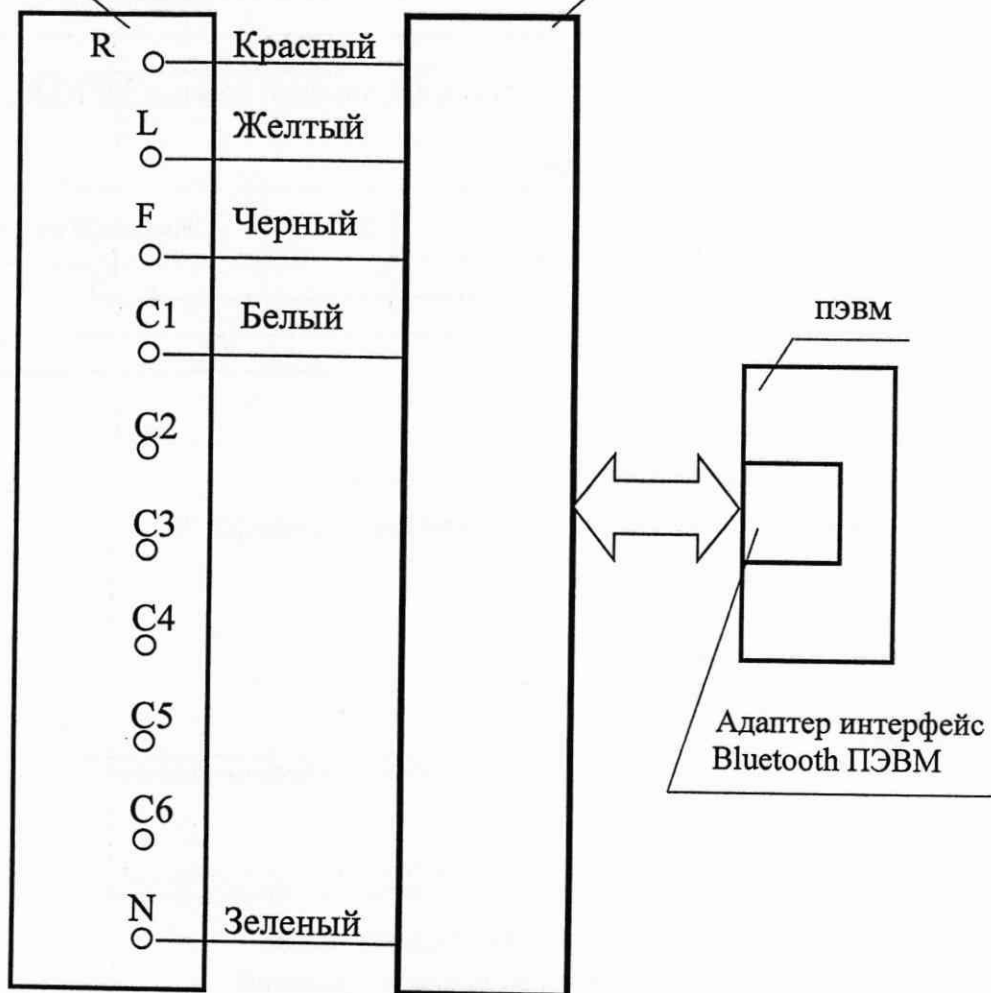


Рисунок Е.1 – Схема определения постоянного тока в цепи пациента

1	Зам				МРБ МП.2310–2013		Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата			18
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	



Приложение Ж
(рекомендуемое)
Форма протокола поверки

наименование организации, проводящей поверку

ПРОТОКОЛ № _____

Поверки системы длительного мониторингирования ЭКГ и АД «КАРДИАН-СДМ» зав. № _____
принадлежащего _____
Изготовитель _____
Дата проведения поверки _____
Поверка проводилась в соответствии с методикой поверки МРБ МП. _____

Таблица 1 – Средства поверки

№ п/п	Наименование	Тип	Заводской номер	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5

Условия поверки

температура окружающего воздуха, °C _____;
относительная влажность окружающего воздуха, % _____;
атмосферное давление, кПа _____.

Результаты поверки

Ж.1 Внешний осмотр

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.2 Опробование

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3 Определение метрологических характеристик

Ж.3.1 Определение диапазона входных напряжений

Диапазон входных напряжений от 30,0 мкВ до 5,0 мВ

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.2 Определение относительной погрешности измерения напряжения

Таблица Ж.1

Канал	Относительная погрешность измерения напряжения при размахе входного сигнала (мВ), %						Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения, %	
	при постоянном напряжении +300, мВ			при постоянном напряжении -300, мВ			в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ включительно	в диапазоне свыше 0,5 до 4,0 мВ
	0,1	0,5	4,0	0,1	0,5	4,0		
1							±15	±7
2								
3								

1	Зам				МРБ МП.2310-2013			Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата				19
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата



Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.3 Определение относительной погрешности регистрации калибровочного сигнала
Таблица Ж.2

Канал	Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала, %	Допускаемое значение погрешности регистрации калибровочного сигнала, %
1		±5
2		
3		

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики
Таблица Ж.3

Частота f , Гц	Канал		
	1	2	3
	δ_f , %	δ_f , %	δ_f , %
0,5			
10,0			
40,0			
50,0			
60,0			
75,0			
100,0			
Пределы допускаемой неравномерности АЧХ, %: - в диапазоне частот от 0,5 до 60,0 Гц включительно; - в диапазоне свыше 60,0 Гц до 100, Гц			от минус 10 до плюс 5 от минус 30 до плюс 5

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.5 Определение входного импеданса
Таблица Ж.4

Канал	Измеренное значение входного импеданса, МОм		Допускаемое значение входного импеданса, МОм, не менее
	при постоянном напряжении +300, мВ	при постоянном напряжении -300, мВ	
1			10
2			
3			

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.6 Определение постоянной времени
Таблица Ж.5

Канал	Постоянная времени, %	Допускаемое значение постоянной времени, с, не менее
1		3,2
2		
3		

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

1	Зам				МРБ МП.2310-2013	Лист 20
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



Ж.3.7 Определение относительной погрешности измерения интервалов времени в диапазоне от 0,1 до 1,0 с

Таблица Ж.6

Частота сигнала, Гц	Измеренное значение относительной погрешности измерения интервалов времени, %	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения интервалов времени, %
1,0		± 2,0
2,0		
10,0		

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.8 Определение диапазона измерения давления и абсолютной погрешности измерения давления в манжете

Таблица Ж.7

Эталонное значение давления, мм рт. ст.	Показания монитора системы при понижении давления, мм рт. ст.	Основная погрешность монитора при понижении давления, мм рт. ст.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм рт. ст.
1	2	3	4

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.9 Определение коэффициента ослабления синфазных сигналов

Таблица Ж.8

Канал	Измеренное значение коэффициента ослабления синфазных сигналов, дБ		Допускаемое значение коэффициента ослабления синфазных сигналов, дБ, не менее
	при постоянном напряжении +300, мВ	при постоянном напряжении -300, мВ	
1			100
2			
3			

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.10 Определение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу

Таблица Ж.9

Канал	Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу, мкВ	Допустимое значение, мкВ, не более
1		20
2		
3		

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	исследовательский и теоретической метрологии. Лист 2Б
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	



Ж.3.11 Определение постоянного тока в цепи пациента

Таблица Ж.10

Канал	Постоянный ток в цепи пациента, мкА	Допустимое значение, мкА, не более
1		0,1
2		
3		

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Ж.3.12 Определение скорости снижения давления в манжете

$V_c =$ _____ мм рт. ст./с

Вывод: _____
соответствует/не соответствует

Заключение по результатам поверки _____

Выдано свидетельство (заключение о непригодности) № _____ от «___» _____ 20____

Поверку провел: _____
Ф.И.О. _____ подпись _____

1	Зам				МРБ МП.2310-2013		Лист
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата			22
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	



Библиография

[1] ТУ ВУ 100370976.006 – 2012. Система длительного мониторингирования электрокардиограмм и артериального давления «КАРДИАН-СДМ»

[2] Правила осуществления метрологической оценки для утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, утвержденные Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 38

[3] Руководство по эксплуатации (паспорт) КСАД.941111.001 РЭ. Система длительного мониторингирования электрокардиограмм и артериального давления «КАРДИАН-СДМ»

[4] Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений, утвержденные Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 24 апреля 2021 г. № 40

1	Зам				МРБ МП.2310–2013	Лист 23
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



Лист регистрации изменений

№ Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов в документе	№ документа	Входящий № сопров. документа и дата	Подпись	Дата
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Аннули- рованных					

1	Зам				МРБ МП.2310-2013	Лист 24
Изм.	Лист	№ Докум	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

УТВЕРЖДАЮ



Первый заместитель директора –
руководитель Центра эталонов, поверки и
калибровки БелГИМ

А.С. Волынец

" 06 " 2022

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам метрологической экспертизы
извещения об изменении методики поверки

Обозначение и наименование МП: МРБ МП.2310-2013 «Система длительного мониторингирования электрокардиограмм и артериального давления «КАРДИАН-СДМ». Методика поверки»

Разработчик: УП «КАРДИАН»

На метрологическую экспертизу представлены следующие документы:

1 Извещение об изменении № 1 МРБ МП.2310-2013

По результатам метрологической экспертизы установлено:

1 Извещением об изменении № 1 наименование методики поверки изменено на «Системы длительного мониторингирования электрокардиограмм и артериального давления «КАРДИАН-СДМ». Методика поверки».

2 Представленная методика поверки с изменением № 1 распространяется на системы длительного мониторингирования электрокардиограмм и артериального давления «КАРДИАН-СДМ» и устанавливает методы и средства проведения поверки.

3 Методика поверки с изменением № 1 соответствует требованиям Постановления Госстандарта от 20 апреля 2021 г. № 38 «Об осуществлении метрологической оценки для утверждения типа средств измерений и стандартных образцов» и техническим нормативным правовым актам в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений.

4 Методика поверки с изменением № 1 может быть использована при проведении поверки систем длительного мониторингирования электрокардиограмм и артериального давления «КАРДИАН-СДМ».

Заместитель директора по науке

Начальник ПИО радио-
электронных измерений

Н.В.Баковец

А.И. Корбутовский