

Регистрационный № 80292-26

Лист № 1  
Всего листов 11

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Наборы пробных очковых линз Armed

#### Назначение средства измерений

Наборы пробных очковых линз Armed предназначены для воспроизведения значений оптической силы при подборе корректирующих очков методом субъективной пробы.

#### Описание средства измерений

Принцип действия набора пробных очковых линз Armed основан на методе субъективной пробы, т.е. подборе очковой линзы или призмы такой оптической силы, при которой максимально компенсируются недостатки зрения и создается наиболее комфортное зрительное ощущение пациента.

Воспроизводимые значения оптической силы очковых линз и призм приведены для зеленой линии «е» спектра излучения ртути (546,1 нм).

В состав наборов пробных очковых линз Armed входят стигматические (сферические) линзы, астигматические (цилиндрические) линзы, очковые призмы, а также вспомогательные линзы: светофильтр красный; светофильтр зеленый; светофильтр синий; пластина плоскопараллельная; цилиндр Мэддокса; скрещенные цилиндры; матированная и полуматированная линзы; диафрагмы точечная и щелевая; линза с перекрестием; окклюдер; оправа пробная универсальная.

Линзы, входящие в набор пробных очковых линз Armed, изготовлены из бесцветного оптического стекла, вспомогательные линзы – из цветных стекол, и вставлены в пластмассовые или металлические оправы с рукояткой. На рукоятку наносится номинальное значение оптической силы линзы, на ободках астигматических линз и призм указывается направление главного сечения нулевого действия линзы или призмы, на рукоятках вспомогательных линз – условное обозначение. Набор пробных очковых линз Armed помещается в кейс с отдельным гнездом для каждого элемента.

Наборы пробных очковых линз Armed выпускаются в наборах № 1, № 2, № 3 и № 4, которые отличаются метрологическими и техническими характеристиками.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Серийный номер в виде буквенно-цифрового обозначения, состоящего из латинских букв и арабских цифр, наносится методом печатной литографии или типографическим способом на идентификационную табличку, расположенную на внешней стороне футляра.

Общий вид наборов пробных очковых линз Armed представлен на рисунках 1 – 9, вид идентификационной таблички представлен на рисунке 10.

Пломбирование средства измерений не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид набора № 1 в металлических оправах



Рисунок 2 – Общий вид набора № 2 в металлических оправах



Рисунок 3 – Общий вид набора № 3 в металлических оправах



Рисунок 4 – Общий вид набора № 4 в металлических оправах



Рисунок 5 – Общий вид набора № 1 в пластмассовых оправах



Рисунок 6 – Общий вид набора № 2 в пластмассовых оправах



Рисунок 7 – Общий вид набора № 3 в пластмассовых оправах



Рисунок 8 – Общий вид набора № 4 в пластмассовых оправках



Место расположения  
идентификационной  
таблички

Рисунок 9 – Общий вид средства измерений в закрытом кейсе


**ARMED**

**Набор пробных очковых линз "Armed" № \_\_\_\_**  
 РУ № РЗН 2021/14254 от \_\_\_\_ г.

**Производитель:** Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.  
 (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.)  
 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu  
 Province, China (1 Байшенг Роуд, Девелопмент Зон, Даньянг Сити,  
 Джиангсу Провинс, Китай)

**Импортер:** ООО «ОПОРА», 630501, Новосибирская область,  
 Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, зд. 5, пом. 1

**Тип оправы линз:**

**Дата изготовления:**

**Серийный номер:**




Место нанесения даты  
изготовления

Место нанесения  
серийного номера

Место нанесения знака  
утверждения типа

Рисунок 10 – Вид идентификационной таблички

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Значение                                             |                        |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Набор № 1                                            | Набор № 2              | Набор № 3                  | Набор № 4                  |
| Диапазон значений вершинной рефракции стигматических (сферических) линз, дптр                                                                                                                                                                                                                               | от -14,00<br>до +6,00                                | от -12,00<br>до +12,00 | от -20,00<br>до +20,00     | от -20,00<br>до +20,00     |
| Диапазон значений вершинной рефракции астигматических (цилиндрических) линз, дптр                                                                                                                                                                                                                           | от -4,00<br>до +4,00                                 | от -6,00<br>до +6,00   | от -6,00<br>до +6,00       | от -6,00<br>до +6,00       |
| Номинальные значения вершинной рефракции скрещенных цилиндров, дптр                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                    | -                      | $\pm 0,25$ ;<br>$\pm 0,50$ | $\pm 0,25$ ;<br>$\pm 0,50$ |
| Диапазон значений призматического действия очковых призм, пр дптр                                                                                                                                                                                                                                           | от 0,50<br>до 3,00                                   | от 0,50<br>до 3,00     | от 0,50<br>до 10,00        | от 0,50<br>до 10,00        |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности значений вершинной рефракции стигматических (сферических) линз, дптр, в диапазонах:<br>от $\pm 0,12$ до $\pm 6,00$ дптр включ.<br>св. $\pm 6,00$ до $\pm 12,00$ дптр включ.<br>св. $\pm 12,00$ до $\pm 15,00$ дптр включ.<br>св. $\pm 15,00$ до $\pm 20,00$ дптр | $\pm 0,06$<br>$\pm 0,12$<br>$\pm 0,18$<br>$\pm 0,25$ |                        |                            |                            |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности значений вершинной рефракции астигматических (цилиндрических) линз, скрещенных цилиндров, дптр, в диапазонах:<br>от $\pm 0,12$ до $\pm 1,00$ дптр включ.<br>св. $\pm 1,00$ до $\pm 4,00$ дптр включ.<br>св. $\pm 4,00$ до $\pm 6,00$ дптр                        | $\pm 0,06$<br>$\pm 0,09$<br>$\pm 0,12$               |                        |                            |                            |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности значений призматического действия очковых призм, пр дптр, в диапазонах:<br>от 0,50 до 3,00 пр дптр включ.<br>св. 3,00 до 10,00 пр дптр                                                                                                                           | $\pm 0,20$<br>$\pm 0,30$                             |                        |                            |                            |
| Предельные отклонения вершинной рефракции очковых призм от нулевого значения, дптр                                                                                                                                                                                                                          | $\pm 0,06$                                           |                        |                            |                            |

Таблица 2 – Технические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значение                                 |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Набор № 1                                | Набор № 2  | Набор № 3  | Набор № 4  |
| Предельные отклонения положения главного сечения нулевого действия цилиндрических линз, скрещенных цилиндров относительно штрихов-меток, показывающих это положение, градус, в диапазонах:<br>от $\pm 0,12$ до $\pm 0,25$ дптр включ.<br>св. $\pm 0,25$ до $\pm 0,50$ дптр включ.<br>св. $\pm 0,50$ до $\pm 6,00$ дптр | $\pm 4$<br>$\pm 3$<br>$\pm 2$            |            |            |            |
| Предельные отклонения положения основания очковых призм относительно штрихов-меток, показывающих это положение, градус, в диапазонах:<br>0,50 пр дптр<br>св. 0,50 до 1,00 пр дптр включ.<br>св. 1,00 до 2,00 пр дптр включ.<br>св. 2,00 до 10,00 пр дптр                                                               | $\pm 7$<br>$\pm 4$<br>$\pm 3$<br>$\pm 2$ |            |            |            |
| Наружный диаметр линз в оправе с допуском $\pm 5$ %, мм                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,0                                     |            |            |            |
| Толщина сферической линзы в пластмассовой / металлической оправе (включая толщину оправы), мм, не более                                                                                                                                                                                                                | 4,2 / 6,0                                | 4,2 / 6,0  | 6,0 / 9,0  | 6,0 / 9,0  |
| Толщина цилиндрической линзы в пластмассовой / металлической оправе (включая толщину оправы), мм, не более                                                                                                                                                                                                             | 4,2 / 4,2                                | 4,3 / 4,2  | 4,3 / 4,2  | 4,2 / 4,2  |
| Толщина очковой призмы в пластмассовой / металлической оправе (включая толщину оправы), мм, не более                                                                                                                                                                                                                   | 4,4 / 4,9                                | 4,4 / 4,9  | 7,1 / 9,0  | 7,1 / 9,5  |
| Толщина вспомогательной линзы в пластмассовой / металлической оправе (включая толщину оправы), мм, не более                                                                                                                                                                                                            | 4,4 / 4,4                                | 4,4 / 4,4  | 4,4 / 4,4  | 4,4 / 4,4  |
| Материал оправы линз                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пластмасса или металл                    |            |            |            |
| Габаритные размеры кейса (длина×ширина×высота) с допуском $\pm 10$ %, мм                                                                                                                                                                                                                                               | 370×280×70                               | 540×310×70 | 560×350×70 | 560×360×70 |
| Масса набора в кейсе с допуском $\pm 10$ %, кг:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |            |            |            |
| - линзы в пластмассовой оправе                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,2                                      | 3,0        | 3,7        | 3,7        |
| - линзы в металлической оправе                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5                                      | 3,5        | 4,6        | 4,8        |

Окончание таблицы 2

| Наименование характеристики                                                                                                                            | Значение                                |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                        | Набор № 1                               | Набор № 2 | Набор № 3 | Набор № 4 |
| Масса оправы пробной универсальной с допуском $\pm 5\%$ , г                                                                                            | 64,0                                    |           |           |           |
| Диапазон показаний межзрачкового расстояния монокулярно оправы пробной универсальной, мм                                                               | от 44 до 76 (или от 48 до 80)           |           |           |           |
| Условия эксплуатации:<br>– температура окружающей среды, °С<br>– относительная влажность (без конденсации), %, не более<br>– атмосферное давление, кПа | от +10 до +35<br><br>80<br>от 86 до 106 |           |           |           |

### Знак утверждения типа

наносится на идентификационную табличку, расположенную на внешней стороне кейса набора, методом печатной литографии или типографическим способом, а также наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографическим способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

| Наименование, обозначение<br>элемента набора                                      | Количество, шт. |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                   | Набор № 1       | Набор № 2 | Набор № 3 | Набор № 4 |
| Набор пробных очковых линз Armed<br>в составе:                                    | 1               |           |           |           |
| - линзы стигматические (сферические) отрицательные с номинальным значением, дптр: |                 |           |           |           |
| 0,12                                                                              | -               | -         | 2         | 2         |
| 0,25                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 0,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 0,75                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,25                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 1,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,75                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 2,25                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 2,75                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 3,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 3,25                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 3,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 3,75                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 4,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 4,25                                                                              | -               | -         | -         | 2         |

Продолжение таблицы 3

| Наименование, обозначение<br>элемента набора                                      | Количество, шт. |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                   | Набор № 1       | Набор № 2 | Набор № 3 | Набор № 4 |
| - линзы стигматические (сферические) отрицательные с номинальным значением, дптр: |                 |           |           |           |
| 4,50                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 4,75                                                                              | -               | -         | -         | 2         |
| 5,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 5,25                                                                              | -               | -         | -         | 2         |
| 5,50                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 5,75                                                                              | -               | -         | -         | 2         |
| 6,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 6,50                                                                              | -               | -         | 2         | 2         |
| 7,00                                                                              | 2               | -         | 2         | 2         |
| 7,50                                                                              | -               | -         | 2         | 2         |
| 8,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 8,50                                                                              | -               | -         | -         | 2         |
| 9,00                                                                              | 2               | -         | 2         | 2         |
| 9,50                                                                              | -               | -         | -         | 2         |
| 10,00                                                                             | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 11,00                                                                             | 2               | -         | 2         | 2         |
| 12,00                                                                             | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 13,00                                                                             | -               | -         | 2         | 2         |
| 14,00                                                                             | 2               | -         | 2         | 2         |
| 15,00                                                                             | -               | -         | 2         | -         |
| 16,00                                                                             | -               | -         | 2         | 2         |
| 18,00                                                                             | -               | -         | 2         | 2         |
| 20,00                                                                             | -               | -         | 2         | 2         |
| - линзы стигматические (сферические) положительные с номинальным значением, дптр: |                 |           |           |           |
| 0,12                                                                              | -               | -         | 2         | 2         |
| 0,25                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 0,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 0,75                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,25                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 1,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,75                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 2,25                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 2,75                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 3,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 3,25                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 3,50                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 3,75                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 4,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 4,25                                                                              | -               | -         | -         | 2         |
| 4,50                                                                              | -               | 2         | 2         | 2         |
| 4,75                                                                              | -               | -         | -         | 2         |
| 5,00                                                                              | 2               | 2         | 2         | 2         |

Продолжение таблицы 3

| Наименование, обозначение<br>элемента набора                                          | Количество, шт. |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                       | Набор № 1       | Набор № 2 | Набор № 3 | Набор № 4 |
| - линзы стигматические (сферические) положительные с номинальным значением, дптр:     |                 |           |           |           |
| 5,25                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 5,50                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 5,75                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 6,00                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 6,50                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 7,00                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 7,50                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 8,00                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 8,50                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 9,00                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 9,50                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 10,00                                                                                 | -               | 2         | 2         | 2         |
| 11,00                                                                                 | -               | -         | 2         | 2         |
| 12,00                                                                                 | -               | 2         | 2         | 2         |
| 13,00                                                                                 | -               | -         | 2         | 2         |
| 14,00                                                                                 | -               | -         | 2         | 2         |
| 15,00                                                                                 | -               | -         | 2         | -         |
| 16,00                                                                                 | -               | -         | 2         | 2         |
| 18,00                                                                                 | -               | -         | 2         | 2         |
| 20,00                                                                                 | -               | -         | 2         | 2         |
| - линзы астигматические (цилиндрические) отрицательные с номинальным значением, дптр: |                 |           |           |           |
| 0,12                                                                                  | -               | -         | 2         | -         |
| 0,25                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 0,50                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 0,75                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,00                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,25                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 1,50                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 1,75                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,00                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 2,25                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 2,50                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,75                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 3,00                                                                                  | 1               | 2         | 2         | 2         |
| 3,25                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 3,50                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 3,75                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 4,00                                                                                  | 1               | 2         | 2         | 2         |
| 4,50                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 5,00                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 5,50                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 6,00                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| - линзы астигматические (цилиндрические) положительные с номинальным значением, дптр: |                 |           |           |           |
| 0,12                                                                                  | -               | -         | 2         | -         |
| 0,25                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 0,50                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |

Окончание таблицы 3

| Наименование, обозначение<br>элемента набора                                          | Количество, шт. |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                       | Набор № 1       | Набор № 2 | Набор № 3 | Набор № 4 |
| - линзы астигматические (цилиндрические) положительные с номинальным значением, дптр: |                 |           |           |           |
| 0,75                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,00                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,25                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 1,50                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 1,75                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,00                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 2,25                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 2,50                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 2,75                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 3,00                                                                                  | 1               | 2         | 2         | 2         |
| 3,25                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 3,50                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| 3,75                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 4,00                                                                                  | 1               | 2         | 2         | 2         |
| 4,50                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 5,00                                                                                  | -               | -         | 2         | 2         |
| 5,50                                                                                  | -               | -         | -         | 2         |
| 6,00                                                                                  | -               | 2         | 2         | 2         |
| - призмы очковые с номинальным значением, пр дптр:                                    |                 |           |           |           |
| 0,50                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 1,00                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 2,00                                                                                  | 2               | 2         | 2         | 2         |
| 3,00                                                                                  | 2               | 2         | 1         | 1         |
| 4,00                                                                                  | -               | -         | 1         | 1         |
| 5,00                                                                                  | -               | -         | 1         | 1         |
| 6,00                                                                                  | -               | -         | 1         | 1         |
| 8,00                                                                                  | -               | -         | 1         | 1         |
| 10,00                                                                                 | -               | -         | 1         | 1         |
| - скрещенные цилиндры с номинальным значением, дптр:                                  |                 |           |           |           |
| 0,25                                                                                  | -               | -         | 1         | 1         |
| 0,50                                                                                  | -               | -         | 1         | 1         |
| - вспомогательные линзы                                                               |                 |           |           |           |
| Точечная диафрагма PH                                                                 | 1               | 1         | 1         | 2         |
| Щелевая диафрагма SS                                                                  | 1               | 1         | 1         | 1         |
| Окклюдер BL                                                                           | 1               | 1         | 1         | 1         |
| Красный светофильтр RF                                                                | 1               | 1         | 1         | 1         |
| Зеленый светофильтр GF                                                                | 1               | 1         | 1         | 1         |
| Синий светофильтр B(BF)                                                               | 1               | -         | -         | -         |
| Матированная линза FL1(FL)                                                            | 1               | -         | 1         | 1         |
| Полуматированная линза FL2                                                            | -               | -         | -         | 1         |
| Цилиндр Мэддокса MR                                                                   | -               | -         | 1         | 1         |
| Плоскопараллельная пластина PL                                                        | 2               | 1         | 2         | 2         |
| Линза с перекрестием CL                                                               | -               | -         | 1         | 1         |
| Оправа пробная универсальная                                                          | 1               | 1         | 1         | 1         |
| Салфетка                                                                              | 1               | 1         | 1         | 1         |
| Руководство по эксплуатации                                                           | 1               | 1         | 1         | 1         |

**Сведения о методах (методиках) измерений**

приведены в разделе 5 «Описание и эксплуатация медицинского изделия» руководства по эксплуатации.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Приказ Росстандарта от «28» февраля 2025 г. № 417 «Об утверждении Государственного первичного эталона единиц оптической силы и коэффициента передачи модуляции очковой оптики и объективов и Государственной поверочной схемы для средств измерений оптической силы и коэффициента передачи модуляции очковой оптики и объективов»

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (пункт 1.12)

Наборы пробных очковых линз Armed. Стандарт предприятия

**Правообладатель**

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Китай  
Адрес: 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China  
Телефон/факс: +86-511-8690 0859/0873 / +86-511-8690 0860  
E-mail: service@yuwell.com

**Изготовитель**

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Китай  
Адрес: 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China  
Адреса мест осуществления деятельности:  
- Yunyang Industrial Park, Danyang City, China  
- No.1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, China  
Телефон/факс: +86-511-8690 0859/0873 / +86-511-8690 0860  
E-mail: service@yuwell.com

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Факс: +7 (499) 124-99-96

E-mail: info@rostest.ru

Web-сайт: www.rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.310639