

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора –
заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»

А.Н. Щипунов

2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ QA-ES III**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
МП-610-005-2018**

2018 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы электрохирургических устройств QA-ES III (далее - анализаторы), изготавливаемые фирмой «Fluke Biomedical», США, и предусматривает методы первичной и периодической поверок и порядок оформления результатов поверки.

Интервал между поверками 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2 Опробование	7.2	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик	7.3	Да	Да
3.1 Определение погрешностей воспроизведения электрического сопротивления	7.3.1	Да	Да
3.2 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока (двойной амплитуды)	7.3.2	Да	Да
3.3 Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока	7.3.3	Да	Да
3.4 Определений погрешностей измерений электрической мощности	7.3.4	Да	Да
4 Идентификация программного обеспечения	7.4	Да	Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применять средства поверки, указанные в таблице 2.

3.2 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерения метрологических характеристик с требуемой точностью.

3.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного и вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
Основное оборудование	
7.3.1	Измеритель RLC E4980A (диапазон измерений сопротивления от 1 мОм до 1 ГОм в диапазоне частот от 20 Гц до 2 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности $\pm(0,05-0,6) \%$)
7.3.1, 7.3.3, 7.3.4	Мультиметр цифровой прецизионный Fluke 8508A (диапазон измерений электрического сопротивления от 1 мОм до 20 ГОм, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm((0,0008-0,151) \cdot 10^{-2} \times R_{\text{изм}} + (0,000025-0,05) \cdot 10^{-2} \times R_{\text{предел}}$, где $R_{\text{изм}}$ и $R_{\text{предел}}$ – измеренные значения и пределы измерений сопротивления); диапазон измерений силы переменного тока от 10 мкА до 20 А в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц, пределы допускаемой погрешности $\pm((0,03-0,4) \%$ от показания + 0,01 % от предела измерений))

Продолжение таблицы 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного и вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.3.2, 7.3.4	Мультиметр 3458А (диапазон измерений напряжения переменного тока от 100 мВ до 1000 В в диапазоне частот от 1 Гц до 10 МГц, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm((0,7-4) \cdot 10^{-4} \cdot U_{\text{изм}} + (0,2-2) \cdot 10^{-4} \cdot U_{\text{предел}})$, где $U_{\text{изм}}$ и $U_{\text{предел}}$ – измеренные значения и пределы измерений напряжения)
7.3.3	Калибратор многофункциональный 3041R (диапазон воспроизведения силы переменного тока от 0,1 мА до 30 А, в частотном диапазоне от 10 Гц до 10 кГц пределы допускаемой абсолютной погрешности от $\pm(0,2 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{уст}} + 0,25 \text{ мкА})$ до $\pm(0,3 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{уст}} + 4 \text{ мА})$)
Вспомогательное оборудование	
7.3.2- 7.3.4	Стабилизатор Электроника 6000 (максимальный входной ток 30 А, выходное напряжение от 10 до 240 В)

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Соблюдают также требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на применяемые средства поверки.

4.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С; от 18 до 28;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106;
- питание от сети переменного тока
- частота, Гц от 49 до 51;
- напряжение, В от 198 до 242.

5.2 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные на право поверки средств измерений электрических величин, изучившие техническую и эксплуатационную документацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- выдержать анализатор в условиях, указанных в разделе 5 настоящей методики поверки, не менее 2 ч;
- подготовить к работе средства поверки в соответствии с их эксплуатационной документацией.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие поверяемого анализатора следующим требованиям:

- комплектность должна соответствовать требованиям эксплуатационной документации;
- все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать надежность фиксации во всех позициях;

- не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления. Все надписи должны быть четкими и ясными;
- все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверка приостанавливается, поверяемый анализатор бракуется и направляется в ремонт.

7.2 Опробование

Опробование необходимо осуществлять в следующем порядке:

- 1) подготовить анализатор к работе согласно руководству по эксплуатации;
- 2) подключить анализатор к сети переменного тока;
- 3) с момента подачи питания на анализатор проконтролировать загорание всех цветowych индикаторов и дисплея.

Результаты опробования считать положительными, если после включения анализатора все цветowe индикаторы и дисплей функционируют согласно описанным в руководстве по эксплуатации последовательностям. В противном случае анализатор бракуется.

7.3 Определение метрологических характеристик

7.3.1 Определение погрешностей воспроизведения электрического сопротивления

7.3.1.1 Определение погрешностей воспроизведения электрического сопротивления переменному току проводят с помощью измерителя RLC E4980A (далее – измеритель RLC) по схеме подключения (рисунок 1) в следующем порядке:

- 1) подключить измеритель RLC к гнездам VARIABLE HI и VARIABLE LO на лицевой панели поверяемого анализатора;

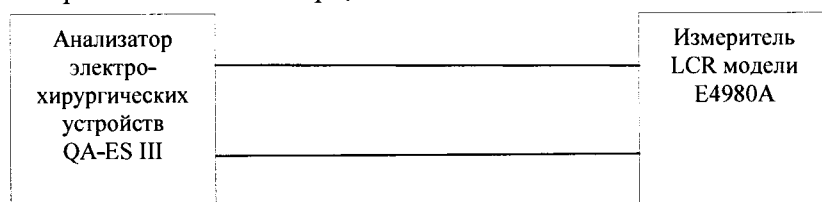


Рисунок 1 – Схема подключения при определении погрешностей воспроизведения электрического сопротивления

- 2) установить на анализаторе значения электрического сопротивления в соответствии с графой 1 таблицы 3 и измерить значения измерителем RLC при частотах тестового сигнала 30 Гц, 1 кГц, 100 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 2 МГц;

- 3) в диапазоне частот тестового сигнала от 30 Гц до 100 кГц включительно рассчитать абсолютную погрешность воспроизведения электрического сопротивления по формуле (1):

$$\Delta R = R_B - R_{И}, \text{ Ом}, \quad (1)$$

где R_B – установленное на анализаторе значение электрического сопротивления, Ом,
 $R_{И}$ – показание измерителя LCR, Ом;

- 4) рассчитать пределы допускаемой абсолютной погрешности по формуле (2):

$$\Delta R_{\text{допуск}} = \pm(2,5 \cdot 10^{-2} \cdot R_B + 1), \text{ Ом}, \quad (2)$$

где R_B – воспроизводимое значение электрического сопротивления, Ом;

- 5) в диапазоне частот тестового сигнала свыше 100 кГц до 2 МГц рассчитать относительную погрешность воспроизведения электрического сопротивления по формуле (3):

$$\delta R = \frac{R_{вс} - R}{R} \cdot 100, \% , \quad (3)$$

где $R_{вс}$ – установленное на анализаторе значение электрического сопротивления, Ом,
 $R_{И}$ – показание измерителя RLC, Ом.

- б) значения относительной погрешности должны находиться в допускаемых пределах $\pm 10\%$.

Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 3.

Таблица 3

Воспроизводимое значение электрического сопротивления, Ом	Частота тестового сигнала	Показание измерителя, Ом	Погрешность воспроизведения	Пределы допускаемой погрешности, ±	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5	6
0	30 Гц			1 Ом	
	1 кГц			1 Ом	
	100 кГц			1 Ом	
	500 кГц			1 Ом	
	1 МГц			1 Ом	
	2 МГц			1 Ом	
10	30 Гц			1,25 Ом	
	1 кГц			1,25 Ом	
	100 кГц			1,25 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	
20	30 Гц			1,5 Ом	
	1 кГц			1,5 Ом	
	100 кГц			1,5 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	
25	30 Гц			1,625 Ом	
	1 кГц			1,625 Ом	
	100 кГц			1,625 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	
100	30 Гц			3,5 Ом	
	1 кГц			3,5 Ом	
	100 кГц			3,5 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	
250	30 Гц			7,25 Ом	
	1 кГц			7,25 Ом	
	100 кГц			7,25 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	
500	30 Гц			13,5 Ом	
	1 кГц			13,5 Ом	
	100 кГц			13,5 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	
750	30 Гц			19,75 Ом	
	1 кГц			19,75 Ом	
	100 кГц			19,75 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	
1000	30 Гц			26 Ом	
	1 кГц			26 Ом	
	100 кГц			26 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
	2 МГц			10 %	

Продолжение таблицы 3

Воспроизводимое значение электрического сопротивления, Ом	Частота тестового сигнала	Показание измерителя, Ом	Погрешность воспроизведения	Пределы допускаемой погрешности, ±	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5	6
1250	30 Гц			32,25 Ом	
	1 кГц			32,25 Ом	
	100 кГц			32,25 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
1500	30 Гц			38,5 Ом	
	1 кГц			38,5 Ом	
	100 кГц			38,5 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
2000	30 Гц			51 Ом	
	1 кГц			51 Ом	
	100 кГц			51 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
2500	30 Гц			63,5 Ом	
	1 кГц			63,5 Ом	
	100 кГц			63,5 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
2600	30 Гц			66 Ом	
	1 кГц			66 Ом	
	100 кГц			66 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
3000	30 Гц			76 Ом	
	1 кГц			76 Ом	
	100 кГц			76 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
4000	30 Гц			101 Ом	
	1 кГц			101 Ом	
	100 кГц			101 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
5200	30 Гц			131 Ом	
	1 кГц			131 Ом	
	100 кГц			131 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
5200	30 Гц			131 Ом	
	1 кГц			131 Ом	
	100 кГц			131 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
5200	30 Гц			131 Ом	
	1 кГц			131 Ом	
	100 кГц			131 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	
5200	30 Гц			131 Ом	
	1 кГц			131 Ом	
	100 кГц			131 Ом	
	500 кГц			10 %	
	1 МГц			10 %	

Результаты поверки считать положительными, если:

1) в диапазоне частот тестового сигнала от 30 Гц до 100 кГц включительно значения абсолютной погрешности воспроизведения электрического сопротивления находятся в допускаемых пределах;

2) в диапазоне частот тестового сигнала свыше 100 кГц до 2 МГц значения относительной погрешности воспроизведения электрического сопротивления находятся в допускаемых пределах ±10 %.

В противном случае анализатор бракуется.

7.3.1.2 Определение относительной погрешности воспроизведения электрического сопротивления в режиме HF Leakage

Испытания провести с помощью измерителя RLC по схеме подключения (рисунок 1) в следующей последовательности:

1) подключить измеритель RLC к гнездам VARIABLE HI и VARIABLE LO на лицевой панели поверяемого анализатора;

2) устанавливать на анализаторе режим HF Leakage, включить режим воспроизведения функциональной кнопкой F4 (START CONT) и измерить измерителем RLC значение электрического сопротивления 200 Ом при частотах тестового сигнала 30 Гц, 1 кГц, 100 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 2 МГц;

3) рассчитать относительную погрешность воспроизведения по формуле (3).

Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 4.

Таблица 4

HF Leakage					
Воспроизводимое значение электрического сопротивления, Ом	Частота тестового сигнала	Показание измерителя, Ом	Относительная погрешность воспроизведения, %	Пределы допускаемой относительной погрешности, ±, %	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5	6
200	30 Гц			2,5	
	1 кГц			2,5	
	100 кГц			2,5	
	500 кГц			2,5	
	1 МГц			2,5	
	2 МГц			2,5	

Результаты поверки считать положительными, если значения относительной погрешности воспроизведения электрического сопротивления находятся в допускаемых пределах $\pm 2,5\%$. В противном случае анализатор бракуется.

7.3.1.3 Определение погрешностей воспроизведения электрического сопротивления в режиме CQM (монитор качества контакта).

Определение погрешностей воспроизведения электрического сопротивления в режиме CQM провести в следующем порядке:

1) подключить мультиметр цифровой прецизионный Fluke 8508A (далее – мультиметр 8508A) к гнездам CQM и VARIABLE LO на лицевой панели поверяемого анализатора по схеме подключения рисунок 2;

2) установить на анализаторе функциональной кнопкой F4 режим CQM и поворотным регулятором выходное электрическое сопротивление в соответствии с графой 1 таблицы 5 ;

3) результаты измерений мультиметром 8508A записать в графу 2 таблицы 5;

4) в диапазоне воспроизведения электрического сопротивления от 0 до 10 Ом рассчитать абсолютную погрешность воспроизведения по формуле (1);

5) в диапазоне воспроизведения электрического сопротивления от 11 до 475 Ом рассчитать относительную погрешность воспроизведения по формуле (3).

Результаты измерений и вычислений записать в таблицы 5 и 6.

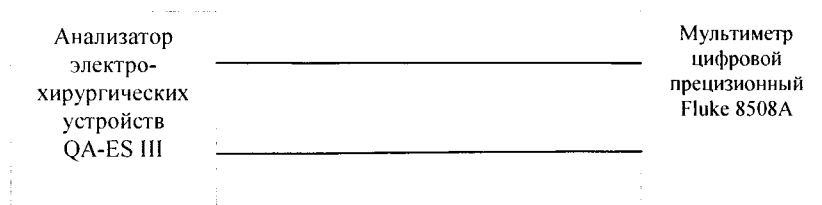


Рисунок 2 – Схема подключения при определении погрешностей воспроизведения электрического сопротивления в режиме CQM

Таблица 5

CQM				
Проверяемая отметка, Ом	Показание мультиметра, Ом	Абсолютная погрешность воспроизведения, Ом	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, \pm , Ом	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5
0			0,5	
2			0,5	
4			0,5	
6			0,5	
8			0,5	
10			0,5	

Таблица 6

CQM				
Проверяемая отметка, Ом	Показание мультиметра, Ом	Относительная погрешность воспроизведения, %	Пределы допускаемой относительной погрешности, \pm , %	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5
11			5	
100			5	
200			5	
300			5	
400			5	
475			5	

Результаты поверки считать положительными, если значения погрешностей воспроизведения электрического сопротивления находятся в допускаемых пределах, приведенных в графе 4 таблиц 5 и 6. В противном случае анализатор бракуется.

7.3.2 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока (двойной амплитуды)

Определение абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока провести с помощью мультиметра 3458A в режиме измерений напряжения переменного тока и стабилизатора с регулируемым выходным напряжением Электроника 6000 (далее – стабилизатор), подключенных по схеме рисунка 3.

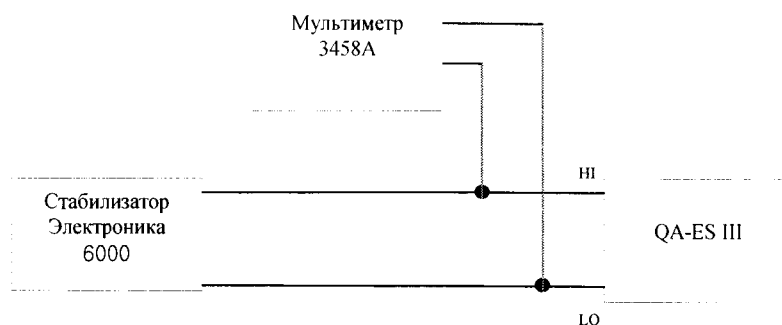


Рисунок 3 – Схема подключения для определения абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока

На испытуемом анализаторе нажать функциональную клавишу F1 (GEN OUTPUT). Поворотным регулятором установить значение электрического сопротивления 5,2 кОм. Нажать клавишу F4 (START CONT). Установить значения выходного напряжения стабилизатора в соответствии с таблицей 7. Для определения двойной амплитуды (размаха) выходного напряжения стабилизатора показание мультиметра умножить на коэффициент $2\sqrt{2}$ и записать в графу 3 таблицы 7. Рассчитать абсолютную погрешность измерений напряжения переменного тока по формуле (4):

$$\Delta U = U_a - U, \quad (4)$$

где U_a – показание анализатора, В;

U – измеренное мультиметром с учетом коэффициента $2\sqrt{2}$ значение размаха напряжения, В.

Рассчитать пределы допускаемой абсолютной погрешности по формуле (5):

$$\Delta U_{\text{допуск}} \pm (10 \cdot 10^{-2} \cdot U_{\text{изм}} + 50), \quad (5)$$

где $U_{\text{изм}}$ – измеренное анализатором значение напряжения, В.

Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 7.

Таблица 7

Проверяемые отметки двойной амплитуды (размаха) напряжения, В	Частота, Гц	Расчетное значение размаха напряжения, В	Показание поверяемого анализатора, В	Абсолютная погрешность измерений, В	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, \pm , В	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5	6	7
0	50 Гц				50	
100	50 Гц				60	
300	50 Гц				80	
640	50 Гц				114	

Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока (двойная амплитуда) находятся в допускаемых пределах, приведенных в графе 6 таблицы 7. В противном случае анализатор бракуется.

7.3.3 Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока.

Определение абсолютной погрешности измерений силы переменного тока проводят с помощью калибратора многофункционального 3041R в режиме воспроизведения силы переменного тока при частоте 1000 Гц, подключенного по схеме рисунка 4.

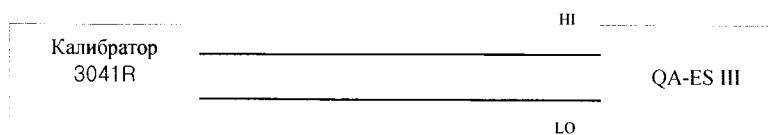


Рисунок 4 – Схема подключения для определения абсолютной погрешности измерений силы переменного тока

На поверяемом анализаторе нажать клавишу F2 (VESSEL SEALING). Поворотным регулятором установить значение электрического сопротивления 0 Ом. Нажать клавишу F4 (START CONT). Установить выходное значение силы тока калибратора 3041R в соответствии с графой 2 таблицы 8. Показание анализатора записать в графу 3 таблицы 8. Рассчитать абсолютную погрешность измерений силы переменного тока по формуле (6):

$$\Delta I = I_a - I, \quad (6)$$

где I_a – показание анализатора, А,

I – установленное значение силы тока на калибраторе, А.

Рассчитать пределы допускаемой абсолютной погрешности по формуле (7):

$$\Delta I_{\text{допуск}} \pm (2,5 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{изм}} + 1 \text{ мА}), \quad (7)$$

где $I_{\text{изм}}$ – измеряемое значение силы переменного тока, А.

Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 8.

Таблица 8

Проверяемые отметки, А	Установленное значение силы тока ($f=1\text{кГц}$) на калибраторе А	Результаты измерений силы тока анализатором, А	Абсолютная погрешность измерений, мА	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, \pm , мА	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5	6
0	0			1	
0,5	0,5			13,5	
1	1			26	
3	3			76	
5	5			126	
5,5	5,5			139	

Результаты поверки считать положительными, если в диапазоне измерений силы переменного тока от 0 до 5,5 А при частоте 1000 Гц значения абсолютной погрешности находятся в допускаемых пределах, приведенных в графе 5 таблицы 8. В противном случае анализатор бракуется.

7.3.4 Определение погрешностей измерений электрической мощности

Определение погрешностей измерений электрической мощности провести с помощью мультиметра 3458А, мультиметра цифрового прецизионного Fluke 8508А и стабилизатора, подключенных по схеме рисунка 5.

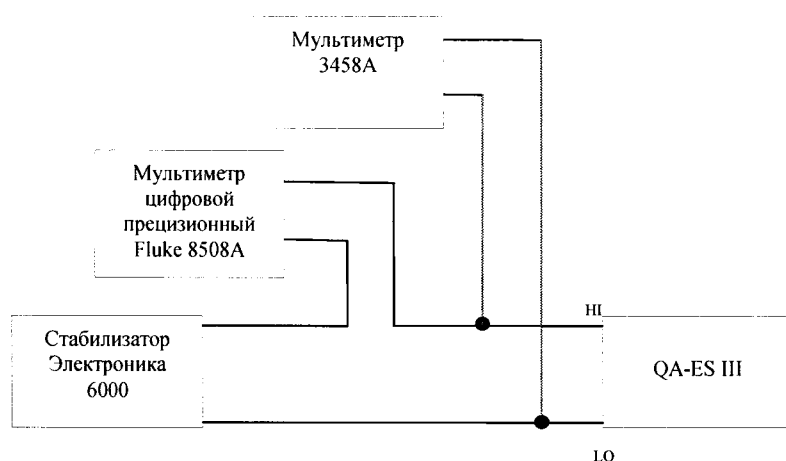


Рисунок 5 – Схема подключения для определения погрешностей измерений электрической мощности

Проверку провести в следующей последовательности:

- 1) мультиметр 3458А установить в режим измерений напряжения переменного тока;
- 2) мультиметр 8508А установить в режим измерений силы переменного тока;
- 3) установить на анализаторе QA-ES III выходное сопротивление в соответствии с графой 1 таблицы 9;
- 4) установить на стабилизаторе выходное напряжение в соответствии с графой 2 таблицы 9, контролировать напряжение мультиметром 3458А. Показание мультиметра 3458А U , В, записать в графу 3 таблицы 9;
- 5) значение силы тока I , А, измеренное мультиметром 8508А, записать в графу 4 таблицы 9;
- 6) рассчитать действительное значение электрической мощности по формуле (8):

$$P_D = I \cdot U, \text{ Вт}; \quad (8)$$

- 7) записать измеренное анализатором значение мощности $P_{\text{изм}}$ в графу 6 таблицы 9;
- 8) в диапазоне измерений электрической мощности св. 9 до 500 Вт рассчитать относительную погрешность измерений по формуле (9):

$$\delta P = \frac{P_{\text{изм}} - P_D}{P_D} \cdot 100 \%, \quad (9)$$

где $P_{\text{изм}}$ – измеренное значение мощности анализатором, Вт;

P_D – действительное значение мощности, Вт.

Значения относительной погрешности измерений электрической мощности должны находиться в допустимых пределах $\pm 5 \%$;

- 9) в диапазоне измерений электрической мощности от 0 до 9 Вт рассчитать абсолютную погрешность измерений по формуле (10):

$$\Delta P = P_{\text{изм}} - P_D; \quad (10)$$

- 10) пределы допускаемой абсолютной погрешности рассчитать по формуле (11):

$$\Delta P_{\text{допуск}} = \pm(5 \cdot 10^{-2} \cdot P_{\text{изм}} + 1) \text{ Вт}, \quad (11)$$

где $P_{изм}$ – измеряемое значение мощности, Вт;

11) результаты измерений и вычислений записать в таблицу 9;

12) повторить пп. 1) – 11) для контрольных точек, указанных в таблице 9.

Таблица 9

Установленное на анализаторе значение выходного сопротивления, Ом	Установленное напряжение на стабилизаторе, В	Показание 3458A, U, В	Показание 8508A, I, А	Действительное значение мощности, P_x , Вт	Измеренное анализатором значение мощности, Вт	Погрешность	Пределы допускаемой погрешности, \pm	Заключение о соответствии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	220			500			5 %	
500	220			100			5 %	
1000	220			50			5 %	
100	70			50			5 %	
1900	100			5			5 % +1 Вт (1,25 Вт)	

Результаты поверки считать положительными, если значения погрешностей измерений электрической мощности находятся в допускаемых пределах, приведенных в графе 8 таблицы 9. В противном случае анализатор бракуется.

7.4 Идентификация программного обеспечения

Номер версии встроенного программного обеспечения (ПО) высвечивается на ЖК-дисплее индикации при включении анализатора. Для проверки соответствия сравнивается номер версии, высвечиваемый на ЖК-дисплее, с номером версии, указанной в таблице 10.

Таблица 10

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	Fluke Biomedical	Ansur QA-ES III Plug in (опциональное)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0.1	не ниже 1.0
Цифровой идентификатор ПО	-	-

Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные совпадают с данным таблицы 10. В противном случае анализатор бракуется.


8 Оформление результатов поверки

8.1 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке установленного образца в установленном порядке.

8.2 При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности с указанием причины непригодности.

8.3 Знак поверки наносится на анализатор и (или) на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска.

Начальник лаборатории 610 ФГУП «ВНИИФТРИ»

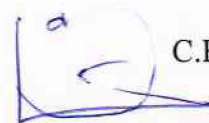

С.В. Шерстобитов